




HÖREN SIE **BEIDE SEITEN** DER GESCHICHTE

WIDEX CROS
HEAR IT FROM BOTH SIDES

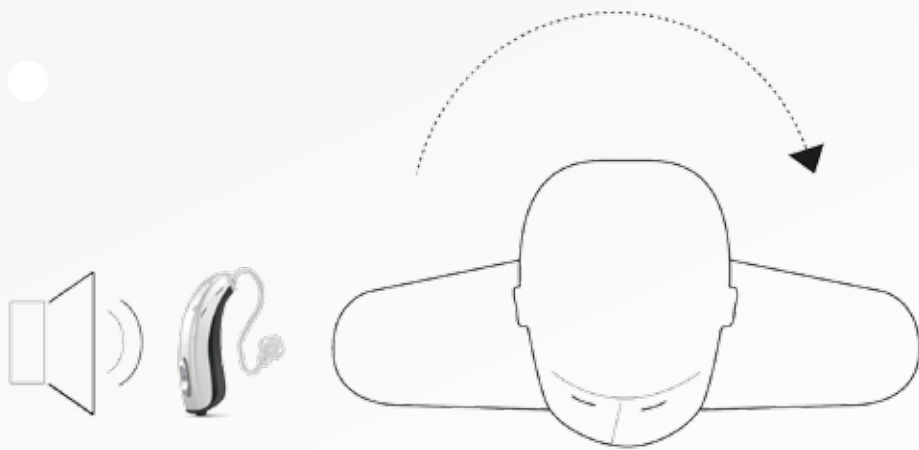

VON DER GEHÖRLOSEN
SEITE DES NÜTZERS WIRD
SCHALL AN SEIN BESSER
HÖRENDES OHR GELEITET.

WIDEX CROS



WIDEX DREAM

WIDEX CROS HÖREN SIE DIE WELT VON BEIDEN SEITEN

Menschen mit einseitiger Gehörlosigkeit entgehen oft viele wichtige Geräusche, und besonders das Sprachverstehen kann für sie zu einer großen Herausforderung werden.

WIDEX CROS bietet Ihren Kunden mit einseitiger Gehörlosigkeit eine hervorragende Lösung. Das einfach anzupassende und zu benutzende WIDEX CROS System kann entweder als CROS- oder BiCROS-Option konfiguriert werden und erleichtert Ihren Kunden durch verbessertes Hörvermögen die akustische Wahrnehmung Ihrer Umgebung.


Bei beiden Optionen wird für die gehörlose Seite das populäre WIDEX FASHION Modell genutzt, während am besser hörenden Ohr jedes Hörsystem der DREAM Serie angepasst werden kann – in vier Leistungsklassen.

- Einfache Handhabung und Pflege
- Einfache Anpassung mit benutzerfreundlicher Software von Widex
- Sehr niedriger Batterieverbrauch
- Modernes und stilvolles Design
- Übertreffende Klangqualität
- Ausgezeichnetes Sprachverständnis
- Keine Echoeffekte, keine Verzerrung
- Kompatibel mit DEX Zubehörgeräten (bei ausgeschalteter CROS-Übertragung)

Mit WIDEX CROS hört der Hörsystem-Träger immer beide Seiten der Geschichte.


DIE CROS-LÖSUNG

Gehörlosigkeit in einem Ohr, normales Hörvermögen im anderen Ohr:

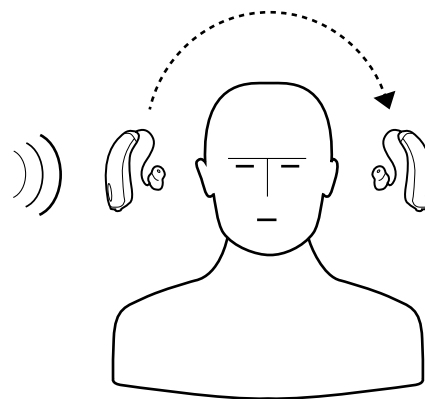

DIE BICROS-LÖSUNG


Gehörlosigkeit in einem Ohr, Hörminderung im anderen Ohr:

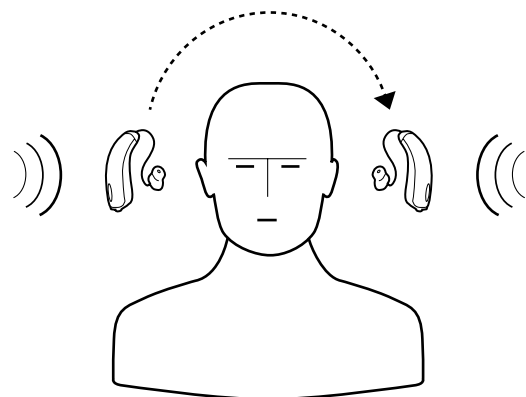

SO FUNKTIONIERT CROS

WIDEX CROS wird am gehörlosen Ohr wie ein normales Hinter-dem-Ohr-Hörsystem getragen. Es empfängt Schall aus der Umgebung und überträgt diesen mit der drahtlosen WidexLink Technologie an ein DREAM Hörsystem am anderen Ohr.

WIDEX CROS **ANPASSEN** DIE **BICROS-LÖSUNG** SCHRITT FÜR SCHRITT

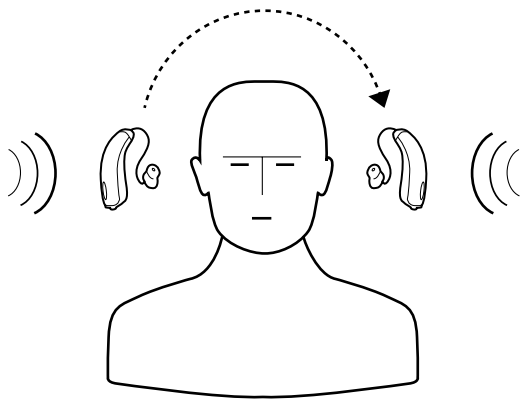

BICROS-LÖSUNG

Wählen Sie basierend auf dem Audiogramm Ihres Kunden ein Hörsystem für sein besser hörendes Ohr.

Legen Sie dem Kunden das Hörsystem und den WIDEX CROS Sender an und klicken Sie auf **Verbinden**. Bitte beachten Sie, dass WIDEX CROS nur während des Demonstrationsmodus aktiv ist. In den Erkennungs- und Hörsystem-Wahl-Fenstern ist der CROS-Sender nicht sichtbar.

1. Nehmen Sie eine monaurale Anpassung am besseren Ohr vor, machen Sie den Rückkopplungstest und erstellen Sie ein Sensogramm.



2. Um das Hörsystem am besser hörenden Ohr mit dem WIDEX CROS Sender zu verbinden, gehen Sie zum Fenster **Handhabung**, wählen Sie CROS/BiCROS und klicken Sie auf **Abstimmung starten**.



3. Wenn sich ein neues Fenster öffnet, wählen Sie hier **BiCROS** und legen Sie die Mikrofoneinstellung (Multi-Mikrofon oder fest omnidirektional) entsprechend den Bedürfnissen Ihres Kunden fest. Die Standardeinstellung ist Multi-Mikrofon. Wählen Sie **Weiter**.



4. Nach Beenden des Abstimmungsprozesses ist es empfehlenswert, den Kunden die BiCROS-Lösung mit Hilfe des Demonstrationsmodus beurteilen zu lassen. Wählen Sie **Demonstrationsmodus starten**.



5. Folgen Sie den Anweisungen im Demonstrationsmodus:
- I. Vergewissern Sie sich, dass das Hörsystem und der CROS-Sender korrekt an den Ohren des Nutzers angelegt sind.
 - II. Drücken Sie den Programmtaster, um WIDEX CROS zu aktivieren.
 - III. Lassen Sie Ihren Kunden den Klang des WIDEX CROS und des Hörsystems beurteilen. Stellen Sie sicher, dass Schall von beiden Seiten des Kopfes hörbar ist. Ihr Kunde soll sich zum einen auf das Klanggleichgewicht zwischen Hörsystem und WIDEX CROS und zum anderen auf die allgemeine Klangqualität des Hörsystems am besseren Ohr konzentrieren.
 - IV. Drücken Sie den Programmtaster erneut, um den WIDEX CROS Sender zu deaktivieren.

- V. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Demonstrationsmodus beenden**.



6. Wenn Sie das Lautstärkeverhältnis zwischen dem Hörsystem am besseren Ohr und dem WIDEX CROS ändern möchten, können Sie hierfür unter **Handhabung** den Mikrofonbalance-Regler benutzen. Wenn Sie allgemeine Änderungen am Klang vornehmen möchten, können Sie dies im Fenster **Feinanpassung** tun.




7. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, öffnen Sie wieder den Demonstrationsmodus und lassen Sie Ihren Kunden den veränderten Klang erneut beurteilen.

WIDEX CROS ANPASSEN DIE **CROS-LÖSUNG** SCHRITT FÜR SCHRITT

CROS-LÖSUNG

1. Führen Sie für das Hörsystem am besseren Ohr eine Verbindung und Erkennung durch.
2. Gehen Sie dann direkt zum Fenster **Handhabung**, wählen Sie dort CROS/BiCROS und starten Sie die Abstimmung.
3. Wählen Sie **CROS** und legen Sie die Mikrofoneinstellung (Multi-Mikrofon oder fest omnidirektional) entsprechend den Bedürfnissen Ihres Kunden fest. Bitte beachten Sie, dass die Mikrofone am Hörsystem des besser hörenden Ohres immer ausgeschaltet sind, wenn die CROS-Option genutzt wird. Wählen Sie **Weiter**, um WIDEX CROS abzustimmen.
4. Lassen Sie Ihren Kunden nun über den Demonstrationsmodus den Klang des WIDEX CROS beurteilen (entsprechend Schritt 5 oben). Ihr Kunde soll sich auf die allgemeine Klangqualität des Hörsystems am besser hörenden Ohr konzentrieren.
5. Wenn nötig können Sie die Verstärkung des Schalls vom WIDEX CROS Sender über den Regler **Verstärkung des übertragenen Signals** anpassen.

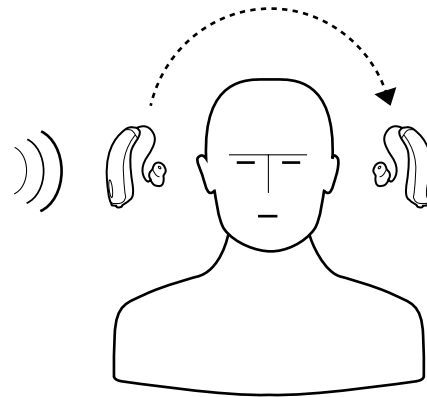





Indem Sie Hörsysteme von Widex wählen, entscheiden Sie sich für die Produkte eines WindMade-zertifizierten Unternehmens. WindMade ist das erste globale Verbraucher-Label, das Unternehmen auszeichnet, die Windenergie nutzen.

WIDEX und DREAM sind Marken der Widex A/S.



Printed by KLS/2013-11
9 502 3590 002 #01

