





HØR HISTORIEN FRA **BEGGE SIDER**



WIDEX CROS
HEAR IT FROM BOTH SIDES

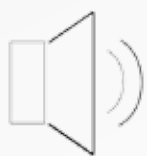

WIDEX CROS

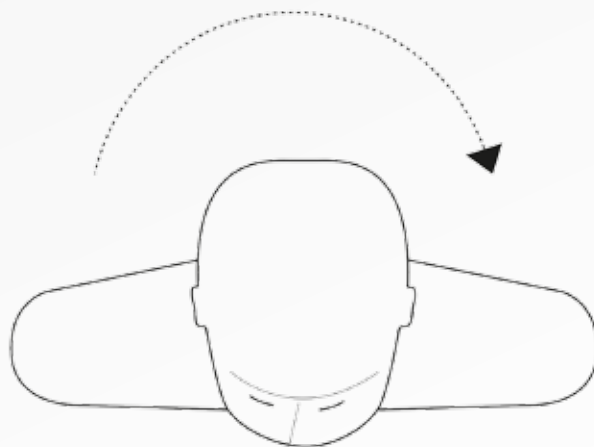

LYDEN OVERFØRES FRA
BRUKERENS DØV ØRE TIL
DET ANDRE ØRE



WIDEX DREAM

WIDEX CROS HØR FRA BEGGE SIDER

Mennesker med ensidig døvhets kan gå glipp av livets mange lydopplevelser og har spesielt problemer i forhold til å lytte på tale.

WIDEX CROS er den ideelle løsningen for dine pasienter med ensidig døvhets. WIDEX CROS kan konfigureres som enten CROS eller BICROS løsning, og er enkel å tilpasse og bruke.


Begge løsningene benytter seg av Widex' spesialtilpassede FASHION modell på brukeres døde øre, mens det andre øret kan tilpasses med et apparat fra DREAM serien – uansett modell.

- Enkel å bruke og vedlikeholde
- Enkel å tilpasse via Widex' brukervennlige software
- Meget lavt batteriforbruk
- Moderne og tiltalende design
- God lyd kvalitet
- Ideell løsning for å lytte til tale
- Ingen ekko eller forstyrrelser
- Kompatibel med DEX hjelpemidler (når det ikke overføres lyd)

Med WIDEX CROS, kan brukeren glede seg over å høre historien fra begge sider


CROS LØSNING

Døv på et øre og normal hørsel på det andre

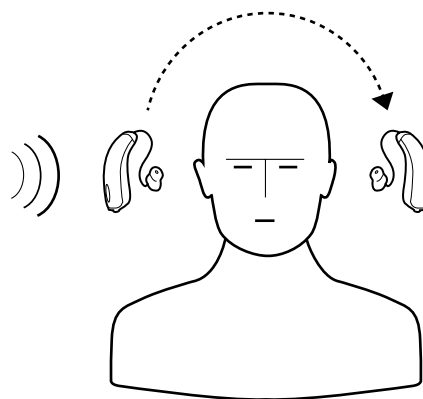

BICROS LØSNING


Døv på et øre og en eller annen grad av hørselstap på det andre

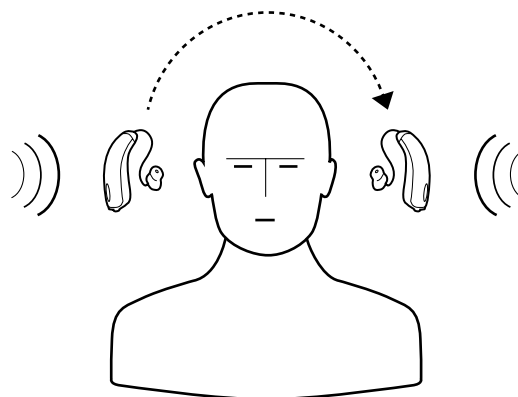

HVORDAN CROS VIRKER

WIDEX CROS bæres på det døde øret på samme måte som et bak øret apparat. Den fanger opp lyder fra omgivelsene og overfører disse trådløst, via WidexLink teknologi, til et DREAM høreapparat på det andre øret.

TILPASNING AV WIDEX CROS BICROS LØSNING – TRINN FOR TRINN

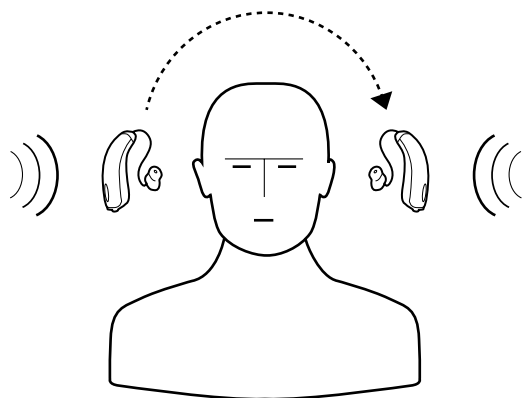

BICROS LØSNING

Basert på pasientens audiogram, velg et høreapparat for det beste øret.

Plasser høreapparatet og WIDEX CROS apparatet på pasienten og trykk på [KOBLE TIL]. Vær oppmerksom på at WIDEX CROS apparatet kun er aktivt i demonstrasjonsvinduet. Det er ikke synlig i [VALG] bildet.

1. Foreta en monaural tilpasning på det beste øret, kjør [FEEDBACKTEST] og mål [SENSOGRAM].



2. For å matche apparatet på det beste øret og WIDEX CROS, gå til [SLUTTBEHANDLING], velg [CROS/BICROS] og trykk på [START MATCHING]



3. I neste vindu, velger du [**BICROS**] og definerer **mikrofoninnstilling** – [Locator] eller [Locator omni], avhengig av brukerens behov. Standard innstilling er [Locator]. Trykk [NESTE].



4. Når matchingen er utført, anbefaler vi å åpne demonstrasjonsvinduet for å la pasienten evaluere BICROS løsningen. Trykk [START].



5. Følg trinnene i demonstrasjonsvinduet:
- I. Forsikre deg om at høreapparatet og WIDEX CROS apparatet er korrekt plassert på brukerens ører.
 - II. Aktiver WIDEX CROS apparatet ved å trykke på programknappen.
 - III. La brukeren evaluere lyden fra WIDEX CROS apparatet og høreapparatene. Forsikre deg om at han/ hun hører lyder fra begge sider av hodet. Be brukeren om å fokusere på balansen mellom lyden fra høreapparatet og lyden fra WIDEX CROS apparatet, så vel som den generelle lyd kvaliteten fra høreapparatet på det beste øret.
 - IV. Slå Av WIDEX CROS apparatet ved å trykke på programbryteren igjen.
 - V. Trykk på [STOPP] i demonstrasjons vindu.



6. Hvis du ønsker å justere styrkeforholdet på lyden i høreapparatet og lyden i fra WIDEX CROS apparatet, bruk [MIKROFON-BALANSE] under [SLUTTBEHANDLING]. Om det er behov for mer generelle justeringer, gå til [FINJUSTERING].




7. Hvis du har foretatt justeringer, åpne demonstrasjons vindu igjen og be brukeren om å evaluere lyden på nytt.

TILPASNING AV CROS CROS LØSNING – TRINN FOR TRINN

CROS LØSNING

1. Koble til og detekter høreapparatet på det beste øret.
2. Gå direkte til [SLUTTBEHANDLING], trykk på [CROS/BICROS] og start matchingen.
3. Trykk på [CROS] og definer mikrofoninnstilling – [Locator] or [Locator omni], avhengig av brukerens behov. Husk at mikrofonene i høreapparatet på det beste øret alltid er slått av når man bruker WIDEX CROS. Trykk på [NESTE] og match WIDEX CROS. La brukeren evaluere lyden fra WIDEX CROS apparatet ved å bruke demonstrasjonsvindu (som beskrevet under punkt 5 på foregående side). De må fokusere på den generelle lyd kvaliteten fra høreapparatet på det beste øret.
4. Om nødvendig, kan du justere styrken på det signalet som kommer fra WIDEX CROS apparatet ved å bruke [‘transmitted sound offset’].

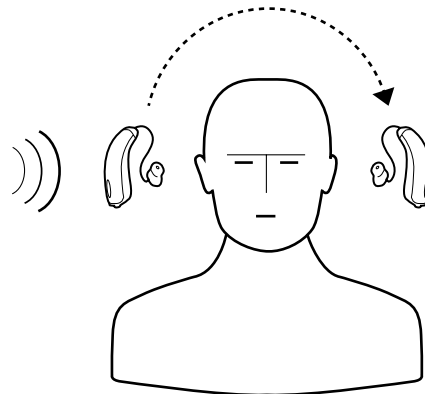





By choosing Widex hearing aids, you are choosing products from a company that has been WindMade certified. WindMade is the first global consumer label identifying companies that use wind power.

WIDEX and DREAM are trademarks of Widex A/S.



Printed by KLS/2014-01
9 502 3590 011 #01

