



RC3-1

**Návod k použití
Dálkový ovladač RC3-1**

WIDEX[®]
high definition hearing

Váš dálkový ovladač a ostatní díly nemusí vypadat přesně stejně, jak jsou zobrazeny v tomto návodu. Vyhrazujeme si právo provádět určité změny podle potřeby.



Sluchadla a jejich příslušenství včetně baterií by se neměla vyhazovat do běžného domácího odpadu. Pro radu, jak správně likvidovat Vaše sluchadla a baterie, se prosím obraťte na Vašeho distributora sluchadel Widex.

Widex tímto prohlašuje, že tento dálkový ovladač s typovým označením RC3-1 je v souladu se základními požadavky a jinými příslušnými opatřeními R&TTE směrnice 1999/5/EC, stejně jako s požadavky směrnice pro zdravotnické přístroje 93/42/EEC.

Obsah

Váš nový dálkový ovladač RC3-1	4
RC3-1	5
Baterie	7
Typ baterie	7
Vložení baterií	8
Výměna baterií	8
Zapnutí a vypnutí dálkového ovladače	9
Výchozí nastavení	9
Hlasitost	10
Ztišení sluchadla	12
Poslechové programy	14
Péče o Váš dálkový ovladač	18
Několik dobrých rad	20
Problémy a jejich odstranění	21
Příslušenství	22

Váš nový dálkový ovladač RC3-1


Doufáme, že budete s dálkovým ovladačem pro Vaše sluchadlo Widex spokojeni. V tomto návodu k použití najdete informace, jak jej správně používat. Abyste maximálně využili jeho schopnosti, doporučujeme přečíst si celou brožurku.

Váš dálkový ovladač je doplňkové příslušenství Vašeho sluchadla. Vaše sluchadlo můžete jednoduše ovládat bez dálkového ovládání, ale použití ovladače Vám nabízí další možnosti. Výhody dálkového ovládání Widex RC3-1 jsou:

- Na rozdíl od tlačítek na Vašem sluchadle, která jsou v uchu nebo za uchem, na ovladači můžete tlačítka lépe vidět.
- Větší tlačítka na dálkovém ovladači jsou snadněji přístupná, než malá tlačítka na sluchadle.
- Dálkový ovladač Vám umožňuje ovládat sluchadlo diskrétněji, např. z kapsy nebo kabelky.
- I u nitroušních (CIC) sluchadel můžete nastavit hlasitost a vybrat program.

RC3-1

Váš dálkový ovladač RC3-1 je malý počítač, který obsahuje údaje pro různá nastavení sluchadla. Obsahuje také rádiový vysílač, který posílá zprávy do sluchadla. Mezi dálkovým ovladačem a sluchadlem nemusí být volný prostor, při používání může být ovladač např. v kapse. Ovladač můžete používat do vzdálenosti asi 1 metru.

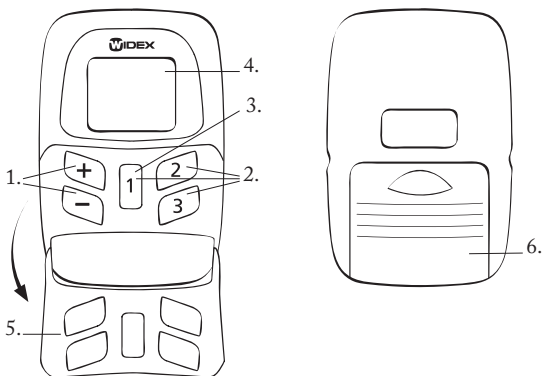

-
1. **Regulátor hlasitosti.** Tlačítka [+] a [-] jsou používána pro nastavení hlasitosti.
 2. **Výběr programu.** Tlačítka [1], [2] a [3] jsou používána pro výběr programu. Váš RC3-1 může pracovat maximálně se třemi programy.
 3. **Vypnutí/zapnutí.** Tlačítko [1] je určeno pro zapnutí dálkového ovládání. Toto tlačítko [1] umožňuje vrátit ovladač do výchozího nastavení P1 V9 (program 1, hlasitost 9).
 4. **Display.** Zobrazuje právě zvolený program (P), hlasitost (V), stav baterie dálkového ovládání.
 5. **Průhledný kryt klávesnice s otvory pro tlačítka.** Se zavřeným krytem je sníženo riziko náhodného stisknutí tlačítka. Odklopením krytu bude ovladač o něco větší a bude se lépe držet. Tlačítka jsou potom vyšší a snadněji přístupná.
 6. **Kryt baterie.**

Baterie

Typ baterie

Doporučený typ baterie pro Váš dálkový ovladač RC3-1 je:


Lithium CR 2032

Váš RC3-1 je napájen dvěma bateriemi CR2032.

Možnost zakoupení vhodných baterií konzultujte s Vaším sluchadlovým odborníkem. Povšimněte si prosím data uvedeného na balení baterií, které udává jejich životnost. Životnost baterie závisí na tom, jak často Váš dálkový ovladač používáte.

Vložení baterií

Znaménko plus (+) na bateriích pro Váš RC3-1 musí být při vkládání do prostoru pro baterie nahoře.

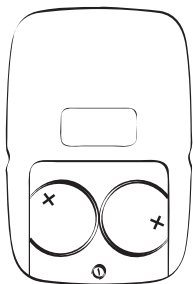

Výměna baterií


Vyměňujte vždy obě baterie současně. Na displeji se zobrazuje stav baterie dálkového ovladače.



Je-li baterie téměř vybitá, bude na displeji zobrazen symbol nepřetržitě. Pokud se symbol objeví pouze krátce, není nutné baterie ještě měnit.

Zapnutí a vypnutí dálkového ovladače


Dálkový ovladač se zapne stisknutím tlačítka [1] po dobu přibližně ½ sekundy. Vypne se standardně po 15 sekundách. Pokud potřebujete, Váš sluchadlový odborník Vám může pomoci vybrat jiný čas, po kterém se ovladač vypne.

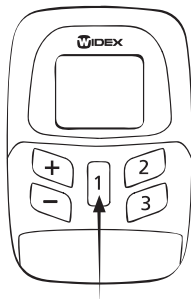

Výchozí nastavení

Je-li Váš RC3-1 zapnut, můžete vrátit ovládání do výchozího nastavení P1 V9, jestliže podržíte tlačítko [1] přibližně 2 sekundy.


Hlasitost

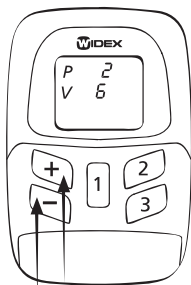

Tlačítka [+] [-] Vám umožňují nastavení hlasitosti ve 13 krocích. Minimální úroveň je 0, při této hodnotě je sluchadlo úplně ztišeno, nejvyšší úroveň je 13. Výchozí úroveň hlasitosti je nastavena standardně na 9 a toto je vždy hlasitost, ke které se dálkový ovladač vrátí. Pokud máte například nastaven poslechový program 2 a hlasitost 6 a potom vyberete jiný program, hlasitost se automaticky změní na 9.


Hlasitost můžete nastavovat jedním stisknutím tlačítka po jednom kroku, nebo můžete držet stisknuté tlačítko [+] nebo [-], dokud není dosažena požadovaná hlasitost.

Nastavení hlasitosti, pokud máte pouze jedno sluchadlo

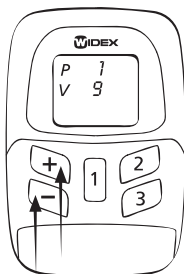

Výchozím stavem je vypnutý dálkový ovladač, který se po zapnutí nastaví na program 1 a hlasitost 9. Stiskněte tlačítko [1] přibližně po dobu ½ sekundy. Zobrazí se výchozí nastavení, P1 V9. Použijte tlačítka [+] [-] pro nastavení požadované hlasitosti. Dálkový ovladač se automaticky vypne přibližně po 15 sekundách.

Nastavení hlasitosti, pokud máte dvě sluchadla

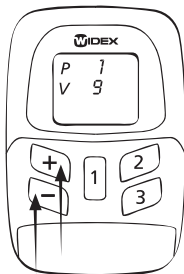


Výchozím stavem je vypnutý dálkový ovladač, který se po zapnutí nastaví na program 1 a hlasitost 9. Stiskněte tlačítko [1] přibližně po dobu ½ sekundy. Zobrazí se výchozí nastavení, P1 V9. Použijte tlačítka [+] [-] pro nastavení požadované hlasitosti. Hlasitost se změní pro obě sluchadla současně. Dálkový ovladač se automaticky vypne přibližně po 15 sekundách.

Ztišení sluchadla


Váš RC3-1 můžete také použít pro úplné ztišení sluchadla.

Funkce ztišení sluchadla, pokud máte pouze jedno sluchadlo

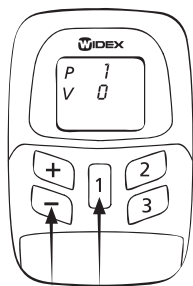


Výchozím stavem je vypnutý dálkový ovladač, který se po zapnutí nastaví na program 1 a hlasitost 9. Stiskněte tlačítko [1] přibližně po dobu ½ sekundy. Potom držte stisknuté tlačítko [1] a zároveň stiskněte tlačítko [-]. Vedle písmena V se zobrazí číslo 0. Pro opětovné zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko [+]. Hlasitost se nastaví na výchozí úroveň (9).

Ztišení sluchadla, pokud máte dvě sluchadla

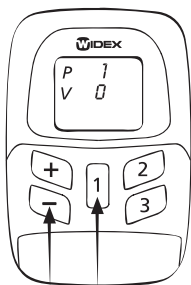

Výchozím stavem je vypnutý dálkový ovladač, který se po zapnutí nastaví na program 1 a hlasitost 9. Stiskněte tlačítko [1] přibližně po dobu ½ sekundy. Zobrazí se výchozí nastavení, P1 V9. Potom držte stisknuté tlačítko [1] a zároveň stiskněte tlačítko [-]. Vedle písmena V se zobrazí číslo 0. Tento údaj platí pro obě sluchadla.

Poslechové programy

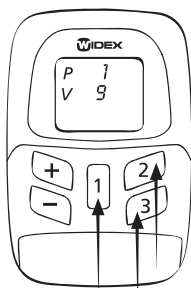

Váš dálkový ovladač RC3-1 Vám umožní vybrat si až ze tří poslechových programů. Společně s Vaším sluchadlovým odborníkem byste si měli určit, které poslechové programy jsou pro Vás užitečné. Pokud budete časem potřebovat jiné poslechové programy, je možné jejich kombi-

naci změnit. Poslechové programy můžete přepínat tlačítka [1], [2] a [3]. Číslo zvoleného programu je zobrazeno na displeji vedle písmena P (program). Také uslyšíte pípnutí, které určuje zvolený program.

Programy jsou rozlišeny následovně:

Program 1: jedno krátké pípnutí


Program 2: dvě krátká pípnutí

Program 3: tři krátká pípnutí

Počet různých pípnutí závisí na tom, kolik programů jste si nechali ve spolupráci s Vaším sluchadlovým odborníkem ve Vašem sluchadle nastavit. V tomto návodu si můžete Vy a Vaš sluchadlový odborník vyznačit, které poslechové programy máte vybrány.


Program	Jméno programu ve sluchadle	Poznámka
1		
2		
3		

Výběr poslechového programu, pokud máte pouze jedno sluchadlo

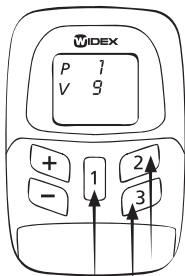

Výchozím stavem je vypnutý dálkový ovladač, který se po zapnutí nastaví na program 1 a hlasitost 9. Stiskněte tlačítko [1] přibližně po dobu ½ sekundy. Tlačítka [1], [2] a [3] vyberte poslechový program, který chcete používat. Dálkový ovladač se automaticky vypne přibližně po 15 sekundách.

Výběr poslechového programu, pokud máte dvě sluchadla

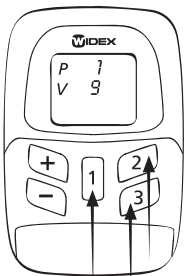

Výchozím stavem je vypnutý dálkový ovladač, který se po zapnutí nastaví na program 1 a hlasitost 9. Stiskněte tlačítko [1] přibližně po dobu ½ sekundy. Tlačítka [1], [2] a [3] vyberte poslechový program, který chcete používat. Vámi vybraný program bude nastaven pro obě sluchadla. Dálkový ovladač se automaticky vypne přibližně po 15 sekundách.




Důležité: Prosím všimněte si, že pokud nastavujete hlasitost a programy u Vašeho sluchadla střídavě dálkovým ovládáním a tlačítka na sluchadle, může dálkový ovladač zrušit nastavení, které bylo dříve provedeno tlačítky umístěnými na sluchadle.

Příklad: Dálkovým ovladačem nastavíte hlasitost nebo poslechový program. Potom vypnete dálkový ovladač. Pokud nyní regulátorem hlasitosti na sluchadle změňte hlasitost nebo přepínačem nastavíte jiný poslechový program a po nějaké době znovu zapnete dálkový ovladač, Vaše sluchadlo se nastaví podle nastavení dálkového ovladače před jeho vypnutím.

Péče o Váš dálkový ovladač

Při dobré péči bude Váš dálkový ovladač RC3-1 spolehlivě sloužit řadu let. Zde je několik zásad, které prodlouží životnost Vašeho dálkového ovladače:

- Starejte se o svůj dálkový ovladač dle jeho hodnoty, tedy velmi pečlivě. Ukládejte jej na chladné, suché a bezpečné místo, pryč z dosahu dětí nebo domácích zvířat.
- Nikdy jej nevystavujte extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti.
- Nikdy se nesnažte rozebírat nebo opravovat Váš dálkový ovladač sami.
- Čistěte dálkový ovladač měkkým suchým hadříkem. Nikdy jej nemyjte vodou, čisticími roztoky nebo jinými tekutinami.

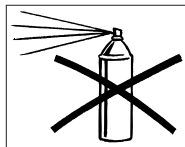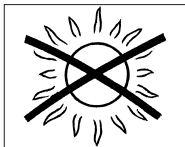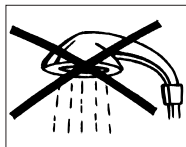

-
- Nenoste s sebou dálkový ovladač během rentgenového vyšetření, MR nebo CT vyšetření, léčby diatermií nebo během podobných radiálních léčebných procedur a nikdy nevkládejte ovladač do mikrovlnné trouby. Některé typy záření mohou ovladač poškodit. Interference z různých jiných radiových zdrojů (alarmy, poplašné systémy, mobilní telefony) jsou slabé a zaručeně Váš ovladač nepoškodí.
 - Dálkový ovladač RC3-1 není schválen pro používání v dolech a jiných prostorech s výbušnými plyny.

Několik dobrých rad

- Dálkový ovladač a ostatní příslušenství je třeba chránit před dětmi, které by je mohly dávat do úst. Také baterie nepatří dětem do ruky. Použité baterie pečlivě vyhazujte. Baterie raději nikdy nevyměňujte před dětmi, neukazujte jim, kde je máte uložené.
- Nikdy nevkládejte baterie do vlastních úst a nikdy nenechte děti brát baterie do rukou. Pokud dojde k polknutí baterie, navštivte ihned lékaře.

Problémy a jejich odstranění

Na následujících stránkách naleznete několik stručných rad, které Vám pomohou, narazíte-li na nějaký problém. Před návštěvou svého sluchadlového odborníka si prosím pečlivě tyto rady přečtěte:


Vaše RC3-1 nefunguje:

- Při stisknutí tlačítek se nic nestane. Odklopte kryt pro snazší přístup k tlačítkům.
- Baterie nejsou správně vloženy. Vyjměte baterie a znovu vložte.
- Baterie jsou vybité. Vyměňte baterie.
- Baterie ve Vašem sluchadle je vybitá. Vyměňte ji.
- Spojení mezi Vaším sluchadlem a dálkovým ovládním se přerušuje. Vypněte a zapněte Vaše sluchadlo.

Příslušenství

Pro Váš ovladač RC3-1 je k dispozici následující příslušenství:


- Kryt baterie s klipem
- Pouzdro na dálkový ovladač
- Řemínek pro kryt s klipem

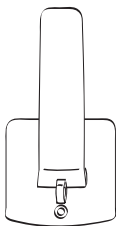

Kryt baterie s klipem




Pouzdro

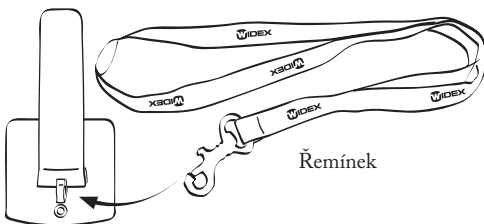

Řemínek

Kryt s klipem má svorku umožňující uchycení RC3 na Váš opasek a očko, ke kterému můžete připevnit řemínek, pokud chcete nosit RC3 na krku.

Výměna bateriového krytu

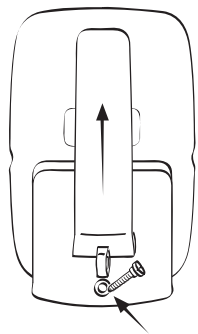

Pokud chcete vyměnit standardní bateriový kryt za kryt s klipem, musíte také vyměnit malý šroubek v krytu baterie. Po vyšroubování původního šroubku přichyťte nový kryt s klipem pomocí delšího šroubku (viz obrázek) dodávaného s tímto krytem.

Nasaďte kryt baterie tak, jak je to zobrazeno na obrázku. Nyní snadno zasunete kryt do správné pozice.

WIDEX Line Praha
Bohušovická 230/19
190 00 Praha 9
Tel: 286 580 396
servis@widex.cz

WIDEX Line Brno
Zelný trh 293/10
602 00 Brno
Tel: 543 331 630
brno@widex.cz

www.widex.cz



WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø
Denmark • www.widex.com



Printed by HTO / 2006-05
9 514 0065 020 #01