




KÄYTTÖOHJE

PHONE-DEX



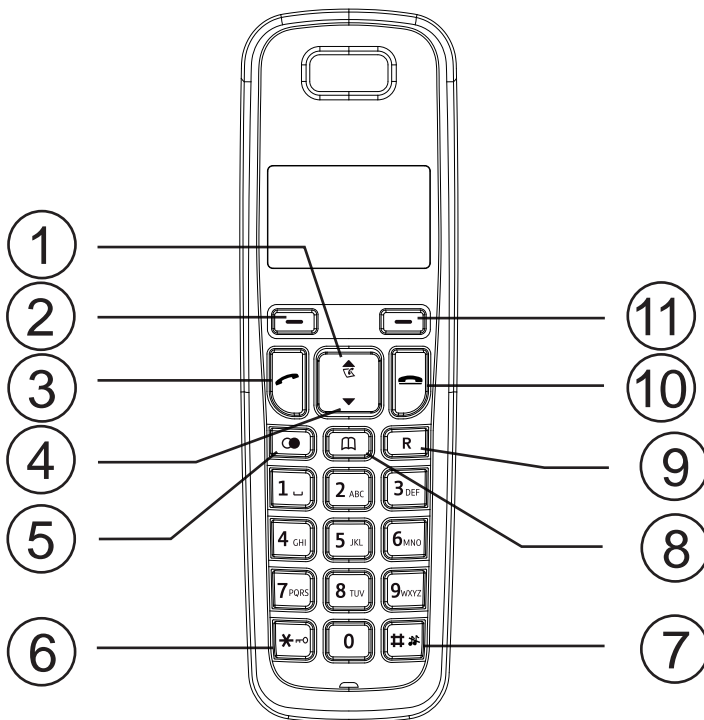




Suomi

- YLÖS/vastaamatta jääneet puhelut
- Vasen valikkopainike / OK
- Soittopainike
- ALAS/uudelleensoittopainike
- Uudelleensoittopainike
- * ja näppäinlukko
- # ja soittoäänien mykistäminen tai ottaminen käyttöön
- Puhelinmuistio
- R R-painike
- Virtapainike ja puhelun katkaisupainike
- Oikea valikkopainike / taaksepäin / sisäpuhelu

Asentaminen

Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi analogisessa puhelinverkossa, seuraavissa maissa AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE.

Kytkeminen






1. Kytke virtalaite sähköpistorasiaan ja puhelinpistoke puhelinpistorasiaan.
2. Aseta akut (1,2 volttia, NiMH) paikoilleen merkintöjen mukaan.
3. Lataa näppäimistö ulospäin (24 tuntia ensimmäisellä kerralla).
4. Paina  (vasen valikkopainike).
5. Selaa / kohtaan **HS SETTINGS/TOIMINNOT**.
6. Paina **OK** (vasen valikkopainike).
7. Selaa valikkoa kohtaan **LANGUAGE/KIELI**. Paina **OK**.
8. Selaa haluamaasi asetukseen. Paina **OK**.
9. Paina  tai useita kertoja  jotta puhelin siirtyy lepotilaan.

Ota huomioon!

Verkkovirtasovitin on irtikytkentälaitte tuotteen ja verkkovirran välillä.

Sähköpistorasian on sijaittava laitteen lähellä ja siihen on oltava helppo pääsy.

Pvm/Aika

1. Paina  (vasen valikkopainike).
 2. Siirry / -painikkeilla kohtaan **TOIMINNOT**. Paina **OK**.
 3. Siirry kohtaan **LUURIN NAYTT** Paina **OK**.
 4. Siirry kohtaan **NAYTA KELLO**. Paina **OK**.
 5. Siirry kohtaan **PAIVA & AIKA**. Paina **OK**.
 6. Siirry kohtaan **ASETA AIKA**. Paina **OK**.
 7. Aseta kellonaika (HH-MM). Paina **OK**.
 8. Siirry kohtaan **ASETA PAIVA**. Paina **OK**.
 9. Syötä päivämäärä (PP KK VV). Paina **OK**.
 10. Poistu valikkonäytöistä painamalla  tai  useita kertoja.
- Myös päivämäärän ja kellonajan esitysmuotoa voidaan muuttaa.

Akku

Kun uudet akut on ladattu täyteen (10 tuntia), niiden teho riittää noin 100 tunnin valmius- tai noin 10 tunnin puheaikaan. Nämä ajat edellyttävät käyttämistä huoneenlämpötilassa. Akkujen täysi kapasiteetti saavutetaan, kun akkuja on ladattu 4–5 kertaa. Akkuja ei voi ylliladata eivätkä ne vahingoitu liian kauan kestävästä lataamisesta.

Varoitus!

Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan vääranäntyyppiseksi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä akkuja. Takuu ei kata väärin akkujen käyttämisestä johtuvia vaurioita.

Ota huomioon!

Puhelu ei muodostu, jos akkujen varaus on liian vähäinen tai tukiasema on liian kaukana. Älä aseta tukiasemaa muiden elektronisten laitteiden lähelle tai paikkaan, jossa se joutuu alttiiksi suoralle auringonpaisteelle tai voimakkaalle lämmölle! Muutoin on olemassa häiriöiden mahdollisuus. Laite voi kuumentua lataamisen aikana. Se on täysin vaaratonta. Käytä vain alkuperäisiä tai vastaavia ladattavia akkuja (1,2 Volittia, NiMH). Takuu ei kata virheellisten akkujen aiheuttamia vahinkoja. Hävitä käytetyt akun ohjeiden mukaisesti.


Akun varaustason ilmaisim

Kun akut ovat lähes tyhjiä, näytössä vilkkuu merkki  ja puhelun aikana kuuluu varoitusääniä.

Huomaa, että akun ilmaisim vilkkuu näytössä, kun luuri on tukiasemassa, eikä se sammuu tai pysähdy, vaikka akku on ladattu.

Kantama

Puhelimen peittoalue vaihtelee 50 ja 300 metrin välillä sen mukaan, miten vapaasti puhelun välittävät radioaallot voivat edetä. Peittoaluetta voi laajentaa kääntämällä päätä siten, että luuri on tukiaseman puolella päätä. Lähestyttäessä peittoalueen rajaa äänenlaatu heikkenee ennen puhelun katkeamista.

Symboli  ilmaisee peittoaluetta. Se sammuu tai vilkkuu peittoalueen ulkopuolella.

Eco functionality (ekologinen toimivuus)

Olemme ottaneet käyttöön ECO FUNCTIONALITY -tarran, jotta asiakkaamme voivat tunnistaa valikoimamme tuotteet, jotka rasittavat ympäristöä tavallista vähemmän.

Tällä tarralla varustetuilla tuotteilla on seuraavat ominaisuudet:

- Tavallista pienempi virrankulutus sekä käyttö- että valmiustilassa.
- Joustava lähetysteho perusyksikön kantaman mukaan.



Käyttäminen

Puhelimesi on suunniteltu toimimaan langattomien Widex-kuulokojeiden kanssa. Tämä tarkoittaa, että puhelimen ääni siirtyy suoraan kuulokojeisiin. Kun laitat puhelimen jommankumman korvan lähelle, 'ding-dong'-ääni kertoo, että toiminto on aktivoitunut. Kun puhelin viedään kantaman ulkopuolelle, kuulokojeet palaavat kuunteluohjelmaan numero 1 (tavallisesti Master, eli pääohjelma).

Jos puhelimen ääni on liian heikko tai voimakas, voimakkuutta voi säätää puhelimen ylös/alas-näppäimestä. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteys kuulokojeen hankintapaikkaan.

Jos puhelimen käyttäjällä ei ole kuulokojetta, puhelin toimii kuten tässä käyttöohjeessa on muutoin kuvattu.



Soittaminen

1. Näppäile puhelinnumero. Voit pyyhkiä painamalla oikeanpuoleista valikkopainiketta **C**.
2. Voit soittaa painamalla . Voit lopettaa painamalla lyhyesti .

Vastaaminen

1. Odota, että puhelin soi.
2. Voit vastata painamalla . Voit lopettaa painamalla lyhyesti .

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painikkeilla  .

Uudelleensoittaminen

Paina . Voit selata 5 viimeksi soitettua numeroa painamalla  . Paina .

Mikrofonin mykistysnäppäin

Mikrofoni voidaan poistaa käytöstä tai ottaa käyttöön puhelun ollessa meneillään painamalla **C**.

Haku

Luuri soi painettaessa tukiaseman painiketta . Merkkiääni päättyy automaattisesti hetken kuluttua, jos käsipuhelimen painiketta  painetaan, tai jos tukiaseman painiketta  painetaan.

Tilapäinen ”Ei saa häiritä”

Voit mykistää soimisen tilapäisesti painamalla luurissa **C** puhelimen soidessa.



Valopainikkeet

Huomaa, että kaksi ylintä painiketta on ”valopainikkeita”. Niiden toiminto näkyy niiden yläpuolella näytöllä.






Puhelinmuistio

Voit tallentaa 20 numeroa ja nimeä. Jos numeronäyttötoiminto on tilattu, puhelimen näyttöön tulee soittajan nimi, jos numero on tallennettu muistioon. Voit valita soittoäänen puhelinmuistioon tallennetun numeron mukaan (edellyttää numeronäyttötoiminnon tilaamista).





Nimien ja numeroiden tallentaminen luuriin

1. Paina . Paina .
2. Siirry kohtaan **LISÄÄ UUSI**. Paina **OK**.
3. Saat haluamasi nimen näkyviin painamalla vastaavaa numeropainiketta useita kertoja. Paina **OK**.
4. Anna puhelinnumero suuntanumeroineen. Voit poistaa painamalla **C**. Paina **OK**.
5. Selaa haluamaasi soittoääneen. Paina **OK**.





Puhelinmuistion hallitseminen

1. Paina . Voit selata muistipaikasta toiseen painamalla /. Voit etsiä nopeasti syöttämällä ensimmäisen kirjaimen painamalla vastaavaa numeronäppäintä.
2. Voit soittaa numeroon näppäimen  avulla. Voit tehdä erilaisia valintoja painamalla .

Muokkaa numeroa

1. Paina  (vasen valikkopainike).
2. Siirry / -painikkeella kohtaan **MUISTIO**, paina **OK**.
3. Siirry nimen kohdalle, jota haluat muokata, ja paina .
4. Siirry kohtaan **EDIT/MUOKKAA**, paina **OK**.
5. Tarkasta, että nimi on oikein ja paina **OK**.
6. Numero näkyy ja osoitin vilkkuu numeron perässä
7. Poista numero painamalla **C**.
8. Syötä oikea numero ja paina **OK**.
9. Valitse soittoääni ja paina **OK**.



Poista numero

1. Paina  (vasen valikkopainike).
2. Siirry / -painikkeella kohtaan **MUISTIO**, paina **OK**.
3. Siirry nimen kohdalle, jonka haluat poistaa, ja paina .
4. Siirry kohtaan **DELETE/POISTA**, paina **OK**.


Saapuneet numerot (numeronäyttö)

Soittajan tiedot näkyvät näytössä. Lisäksi näet 10 viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun tiedot. Jos kaikkiin puheluihin ei ole vastattu, valmiustilassa näyttöön tulee teksti **UUSI PUH.** ja luettelossa näkyy ★. Tämä toiminto on tilattava operaattorilta.

Uusien puheluiden/numerolokin poistaminen

1. Paina ▲ Selaa haluamaasi muistipaikkaan käyttämällä ▼.
2. Voit soittaa numeroon näppäimen  avulla. Voit tehdä erilaisia valintoja painamalla  (↶= taaksepäin).

Uusien puheluiden/numerolokin poistaminen

1. Siirry ▲-painikkeella uuden puhelinnumeron kohdalle ja paina  (vasen valikkopainike)
2. Siirry ▼-painikkeella kohtaan **POISTA** tai jos numeroita on useampia, siirry kohtaan **POISTA KAIK.**, ja paina **OK**.
3. Näytöllä näkyy **VAHVISTA**, paina **OK**.

Numeronäyttöviestit

Näyttöön tulee puhelinnumeroiden lisäksi joskus viestejä:

NRO EI SAATU Tuntematon numero. esimerkiksi ulkomailta tullut puhelu.


SALATTU NRO Salainen numero. Numeron näkyminen on estetty.

OO Ilmoitus odottavasta viestistä* (ei käytössä suomessa).



*Poistaminen: Paina ▲, ja pidä **4** painettuna.

Asetukset

Toiminnot

1. Paina . Selaa valikkoa kohtaan **TOIMINNOT**. Paina **OK**.
2. Valitse haluamasi toiminto, esimerkiksi **KIELI**. Paina **OK**.
3. Selaa haluamaasi asetukseen. Paina **OK**.

ASETA HER

Kun herätys on käytössä, valmiustilassa näytössä näkyy  Muistutusäänen kesto on 45 sekuntia. Voit vaimentaa herätyksen painamalla mitä puhelimen painiketta tahansa. Jos **TORKKU** on otettu käyttöön, äänimerkki kuuluu uudestaan seitsemän minuutin kuluttua. Voit poistaa herätyksen pysyvästi valikon avulla tai pitämällä  painettuna muutaman sekunnin ajan. Muistutusäänen äänenvoimakkuus on sama kuin soittoaänen.

SOITTOÄÄNI

Luurin soittoaäni.
SISÄ/ULKO = sisäpuhelu/ulkolinjapuhelu.

Ota huomioon!

Melodia 2,3,4... voi jatkua enintään kahdeksan sekunnin ajan, jos puheluun vastataan toisesta puhelimesta.

VAROITUSÄÄNI

Varoitusäänet kuuluvat painikkeita painettaessa, akun tyhjentäessä tai kun luuri on peittoalueen ulkopuolella.

KIELI

Kieliasetuksista on *lisätietoja luvussa Kytkeminen*.

OMA NIMI

Tämä teksti näkyy lepotilassa.

NIMI/KELLO

Oma nimi/kello näkyy lepotilassa.

AUTOM VAST


Puheluun vastataan, kun luuri nostetaan tukiasemasta.

PÄIVÄ & AIKA

Ajan ja päivämäärän asettaminen.

Järjestelmäasetukset

Laitetta toimitettaessa tunnusluku oli 0000.

1. Paina . Selaa valikkoa kohtaan **JÄRJESTELMÄ**. Paina **OK**.
2. Selaa haluamaasi toimintoon. Paina **OK**.
3. Määritä haluamasi asennus. Paina **OK**.

POISTA LUURI

Luurin rekisteröinnin peruuttaminen.
VAROITUS: Luuria, jonka rekisteröinti on poistettu, ei voi enää käyttää järjestelmässä!

R-PAINIKEAIK

PITKA = Ranska ja Portugali. **LYHYT** = Muut maat mm. Suomi

PIN-KOODI


Koodia (esimerkiksi 0000) voidaan muuttaa.



Laajennettu järjestelmä

(Kaksi tai useampia luureja, esim. duo, trio...)




Sisäpuheluissa käytettävä kutsunumero näkyy valmiustilassa puhelimen näytössä. Tukiasema kannattaa sijoittaa käyttöalueen keskelle. Näin kaikilla luureilla on suunnilleen yhtä suuri peittoalue.

Sisäpuhelu

1. Paina  (oikea valikkopainike).
2. Anna haluamasi luurin kutsunumero **1-5**.

Jos sisäisen puhelun aikana saapuu ulkoinen puhelu, kuulet äänimerkin. Lopeta sisäinen puhelu painamalla  ja vastaa sitten ulkoiseen puheluun painamalla .

Puhelun siirto/puhelinneuvottelu



1. Ulkolinjapuhelu on meneillään.
2. Paina . Selaa valikkoa kohtaan **SISÄPUHELU**. Paina **OK**.
3. Anna haluamasi luurin kutsunumero **1-5**.
4. Siirtäminen: paina ,
puhelinneuvottelu: pidä  painettuna.

Uuden luurin rekisteröiminen

Kaikki pakkauksen sisältämät luurit on rekisteröity tukiasemaan. Tätä toimintoa tarvitaan vain erillisille luureille tai tehtäessä huoltotöitä. Voit rekisteröidä yhteen tukiasemaan enintään 5 luuria.

Ota huomioon!

Tämä malli on GAP-yhteensopiva (Generic Access Profile), mikä tarkoittaa, että luuria ja tukiasemaa voidaan käyttää yhdessä useimpien GAP-yhteensopivien laitteiden kanssa, riippumatta valmistajasta. GAP-protokolla ei kuitenkaan voi taata, että kaikki toiminnot olisivat käytettävissä. Lisäluureja ei ole saatavilla lisävarusteena.

1. Pidä tukiaseman painiketta  painettuna noin 6 sekuntia.
2. Paina . Selaa valikkoa kohtaan **REKISTERÖI**. Paina **OK**.
3. Anna tukiaseman PIN-koodi (esimerkiksi 0000). Paina **OK**.
4. Jos rekisteröinti onnistui, laite palaa valmiustilaan minuutin kuluessa.

Vianmääritys

Tarkista, että puhelinjohto ei ole vaurioitunut, ja että sen liittimet on asetettu kunnolla paikoilleen. Irrota kaikki lisävarusteet, jatkojohdot ja muut puhelimet. Jos laite toimii nyt, vika on jossakin lisävarusteessa.

Kokeile, toimiiko laite jossakin toisessa puhelinliittymässä, esimerkiksi naapurin luona. Jos laite toimii siinä, vika on puhelinlinjassa.

Puhelin soi, mutta numero ei näy

- Numeronäyttötoiminto on tilattava operaattorilta.

Puhelun aikana kuuluu varoitusääni tai puhelin ei voi muodostaa yhteyttä

- Akut ovat tyhjentyneet. Lataa luuri.
- Luuri voi olla peittoalueen rajalla. Siirry lähemmäs tukiasemaa.

Jos puhelin ei toimi

- Tarkista, että pistokoe ja puhelinjohto on yhdistetty oikein.
- Tarkista, että luurin akut on ladattu täyteen.
- Kytke toinen, toimiva puhelin puhelinpistorasiaan.

Puhelin jatkaa soimista

- Kun puheluun on vastattu toisesta puhelimesta, puhelin voi soida jopa 8 sekunnin ajan.

Jos laite edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta ei toimi, ota yhteys laitteen ostopaikkaan. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä kuittia tai laskukopiota vastaan.

Takuu

Takuu

Tällä laitteella on yhden vuoden DORO-takuu. Mahdollisen käyttöhäiriön yhteydessä ota yhteys liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuuhuolto suoritetaan vain alkuperäistä ostokuittia tai laskukopiota vastaan. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu onnettomuudesta tai siihen verrattavasta tapahtumasta, tehdyistä muutoksista, kosteuden tai nesteiden pääsystä puhelimeen, hoidon laiminlyömisestä, ohjeiden vastaisesta käytöstä, huonosta hoidosta tai muusta ostajan toimenpiteestä. Takuu ei kata myöskään ukkosen aiheuttamia eikä muita sähköjännitteen vaihteluja. On suositeltavaa irrottaa laitteen liitännät ukkosen ajaksi. Akut ovat kuluvia osia eivätkä kuulu takuun piiriin. Käytä VAIN alkuperäisiä tai vastaavia ladattavia akkuja (1,2 Volittia, NiMH).

Specific Absorption Rate (SAR)

Tämä laite täyttää voimassaolevat kansainväliset radiosäteilyä koskevat määräykset. Enimmäisraja WHO:n mukaan on 2W/kg (10g kudosta kohti).Tämän puhelimen mitattu arvo on 0,04 W/kg (10g kudosta kohti). Tukiaseman lähellä, eli 20% maksimikantoalueen sisällä, SAR-arvo pienentyy arvoon 0,02 W/kg (10g kudosta kohti).

Vakuutus vaatimusten täyttämisestä

Doro vakuuttaa täten, että PHONE-DEX täyttää direktiivien 1999/5/EU sekä 2002/95/EU oleelliset vaatimukset ja muutkin keskeiset määräykset. Valmistajan vakuutus on nähtävillä osoitteessa

www.doro.com/dofc

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
PHONE-DEX



Suomi

V. 1.2

www.doro.com



Printed by HTO / 2013-03
514 0200 013 #01