




HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PHONE-DEX



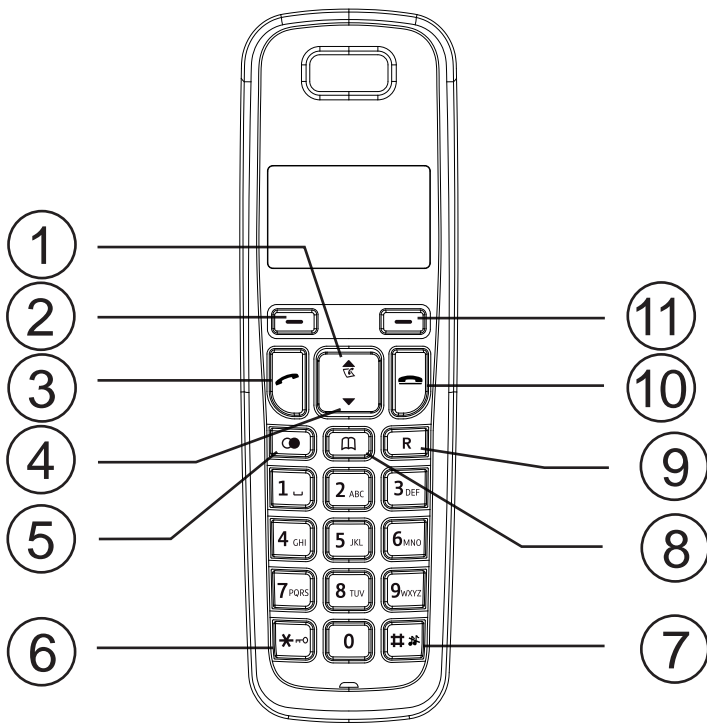




Magyarul

1. FEL/nem fogadott hívás
2. Bal menügomb/OK
3. Hívás gomb
4. LE
5. Újrahívás
6. * és billentyűzár
7. # és csengés ki-be
8. Telefonkönyv
9. Hívásátadás gomb
10. Megszakító- és be-ki kapcsoló gomb
11. Jobb menügomb/vissza/belső hívás

Telepítés

Ez a berendezés a AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SI, SK, SE analóg telefonhálózaton való használatra készült.

Csatlakoztatás

1. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet és a telefonkábel a megfelelő fali aljzathoz.
2. Helyezze be az akkumulátorokat (1,2 V-os NiMH) a jelzések alapján.
3. Töltse a kézibeszélőt előre fordított billentyűzettel (első alkalommal 24 órán át).
4. Nyomja meg a  gombot (bal menügomb).
5. Lépjen a **KEZIB.BEALL./HS SETTINGS** pontra a / gombokkal.
6. Nyomja meg az **OK** gombot (bal menügomb).
7. Lépjen a **NYELV/LANGUAGE** pontra. Nyomja meg az **OK** gombot.
8. Lépjen a kívánt beállításra. Nyomja meg az **OK** gombot.
9. A  gomb egyszeri vagy a  többszöri megnyomásával lépjen készenléti állapotba.


Megjegyzés!

A készülék és az elektromos hálózat közötti megszakítóeszköz szerepét a hálózati tápegység tölti be. A konnector legyen a készülékhez közeli, jól elérhető helyen.

Akkumulátor

Viszonylag új akkumulátorok esetén a teljes feltöltés (10 órás töltés után) körülbelül 100 óra készenléti időt és mintegy 10 óra beszélgetési időt biztosít. Ezek az idők szobahőmérsékleten érvényesek. Az akkumulátorok csak 4-5 feltöltés után érik el teljes kapacitásukat. Túltöltés nem lehetséges, az akkumulátoroknak a „túl hosszú” töltés nem árt.

Akkumulátortöltöttség-jelző


Amikor az akkumulátor már közel van a lemerüléshez, ezt a  ikon villogása, hívás közben pedig figyelmeztetőhang jelzi.

Felhívjuk figyelmét, hogy amikor a kézibeszélő a bázisegységen van, a telepíkon végig villogni fog a kijelzőn, s ez az akkumulátor teljes feltöltődése után sem szűnik meg.

Figyelem!

Ha gyenge az akkumulátor, vagy ha túl nagy a távolság a bázisegység és a telefon között, akkor a készülék nem tud kapcsolódni a vonalra. Ne helyezze a bázisegységet más elektromos készülék közelébe, illetve közvetlen napsugárzás vagy más hőforrások hatásának kitett helyre. Ez az interferencia veszélyének megelőzésére szolgál. Töltés közben a készülék felmelegszik; ez normális jelenség, nem jelent veszélyt. Kizárólag eredeti akkumulátorokat használjon. A jótállás nem terjed ki a nem megfelelő akkumulátor okozta károkra.

Hatótávolság

A telefon hatótávolsága attól függ, hogy van-e akadály a beszélgetést szállító rádióhullámok útjában; normál esetben 50–300 méteres. A jelerősség javítható, ha úgy fordítjuk a fejünket, hogy a kézibeszélő a bázisegység felé forduljon. A hatókör határán a hangminőség gyengül, végül a hívás megszakad. A hatókörön belül a kijelzőn  ikon látható, mely a hatókörön kívül eltűnik vagy villog.

Eco funkcionalitás

Mi vezettük be ECO FUNKCIONALITÁS címke segítségével az ügyfelek a termékek azonosítására a mi választékban, amelyek kisebb hatást gyakorol a környezetre. Tartalmazó termékek címkéjén ez a funkció:

- Csökkentett energiafogyasztás mind a működési, illetve a készenléti üzemmód.
- Adaptív átviteli teljesítmény a típustól függően a bázisállomásra.

Működése

Az Ön telefonja kifejezetten alkalmas arra, hogy a Widex vezeték nélküli hallókészülékeivel való együtt működésre. Ez azt jelenti, hogy a telefonból érkező hang közvetlenül a hallókészülék(ek) be kerül. Amikor valamelyik füléhez közel teszi a telefont egy "csilingelő" hang fogja jelezni, hogy a funkció aktív. Amikor a telefon a hatótávolságon kívül kerül, az Ön hallókészüléke(i), visszatér az egyes számú programként meghatározott hallásprogramra (rendszerint Master program).



Amennyiben a telefonhang hang túl halk vagy túlságosan hangos, használhatja a fel/le gombot a telefonon a hangerő beállítására. Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük konzultáljon audiológusával.

Azoknak a felhasználóknak, akik nem viselnek hallókészüléket, a telefon úgy működik, mint ahogy egyébként ebben a füzetben leírásra került.

Hívás kezdeményezése

1. Adja meg a kívánt számot. Szükség esetén a **C** gombbal törölhet számjegyeket.
2. Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot. A hívás a  gombbal fejezhető be.




Hívás fogadása

1. Várjon, amíg csengeni nem kezd a kézibeszélő.
2. A hívás fogadásához nyomja meg a  gombot. A hívás a  gombbal fejezhető be.

Hangerő-szabályozás

Hívás közben a / gombokkal módosítható a hangerő.




Újrahívás

Nyomja meg a  gombot. A / gomb megnyomása után válasszon a 5 legutóbb hívott szám közül. Nyomja meg a  gombot.

Némítás gomb

Hívás közben a mikrofon a **C** gombbal kapcsolható ki és be.

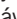

Kereső hívás

A bázisegység  gombjának megnyomásakor a kézibeszélő csengeni kezd. A jelzés a kézibeszélő  gombjával vagy a bázisegység  gombjával kapcsolható ki, illetve egy idő után automatikusan leáll.






Telefonkönyv

20 név és szám menthető a készülékre. Hívóazonosító szolgáltatás előfizetése esetén bejövő hívásnál megjelenik az adott hívónak a telefonkönyvben tárolt neve. A telefonkönyvben tárolt számok esetén különböző csengések közül választhat (ha a telefontársaságnál előfizetett a hívóazonosítás szolgáltatásra).

Név/szám mentése a kézibeszélőre

1. Nyomja meg a  gombot. Nyomja meg az  gombot.
2. Lépjen a **HOZZAADAS** pontra. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Írja be a nevet a megfelelő számgombok egyszeri vagy többszöri lenyomásával. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Írja be a telefonszámot, körzetszámmal együtt (**C**=törlés). Nyomja meg az **OK** gombot.
5. Lépjen a kívánt csengőhangra. Nyomja meg az **OK** gombot.






A telefonkönyv kezelése

1. Nyomja meg a  gombot. A bejegyzések között a / gombokkal mozoghat. Gyorskereséshez nyomja meg a kívánt név első betűjének megfelelő számgombot.
2. A  gombbal hívást kezdeményezhet, az  megnyomása után pedig választhat egy lehetőséget.

Bejövő hívások száma/hívóazonosító

A kijelzőn megjelenik a hívó azonosítója, valamint a legutóbbi 10 nem fogadott hívás telefonszáma. Készenléti állapotban megjelenik az **UJ HIVAS** felirat, és a listán **★** jelzi a nem fogadott hívásokat. A funkcióra külön elő kell fizetni a szolgáltatónál.

Visszakérés és tárcsázás

1. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a kívánt bejegyzésre a  gombokkal.
2. A  gombbal hívást kezdeményezhet, az  megnyomása után pedig választhat egy lehetőséget ( = vissza).

Hívóazonosító üzenetek

A szám kijelzése helyett bizonyos esetekben a következők jelenhetnek meg:


NEM ELERHETO Ismeretlen szám, pl. nemzetközi szám esetén.



MEGTAGADVA A másik számra vonatkozó információ blokkolva van. A szám nem jeleníthető meg.

OO Üzenetjelzés* a telefonszolgáltatótól.

Beállítások

Funkciók

1. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a **KEZIB.BEALL.** pontra. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Lépjen a kívánt funkcióra (pl. **NYELV**). Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Lépjen a kívánt beállításra. Nyomja meg az **OK** gombot.

EBRESZTES Amikor aktív az ébresztés, készenléti állapotban  ikon látható a kijelzőn. Az ébresztő beindulásakor hangjelzés hallható 45 másodpercig. Ez bármely gombbal kikapcsolható. Aktív **SZUNDI** esetén az ébresztés 7 perc múlva újra megszólal. Tartósan a menüben vagy a  gombot néhány másodpercre lenyomva kapcsolható ki. A hangjelzés intenzitását a beállított csengőhangerő határozza meg.

CSENG.BEALL. A kézibeszélő csengőhangja.

BELSO/KULSO=belső/külső hívás csengőhangja.

A 2–5. dallam még 8 másodpercig folytatható, ha egy másik telefon fogadja a hívást.

HANG BEALL. Billentyűhang, gyenge akkumulátor, nincs térerő.

NYELV Magyarázat a Csatlakoztatás című részben.

K.B. ATNEVEZ A készenléti állapotban látható felirat.


K.B.-KIJELZO Név/idő megjelenítése készenléti állapotban.

AUT. FOGADAS A kézibeszélő automatikusan fogadja a hívást, amikor kiveszik a bázisegységből.

DATUM ES IDO A dátum és idő beállítása.

Rendszerbeállítások

A rendszer-PIN gyári beállítása 0000.

1. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a **BAZIS BEALL.** pontra. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Lépjen a kívánt funkcióra. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Adja meg a kívánt beállítást. Nyomja meg az **OK** gombot.

KEZIB. TORL. Kézibeszélő lejelentése.

TARCS. MOD A legtöbb országban hangeffektusos tárcsázás szükséges.

HIV.ATAD.IDO **KOZEPES**=Franciaország,Portugália


ROVID = egyéb országok (Magyar)



PIN MODOSIT. Megváltoztatható a kód (pl. 0000).

Bővített rendszer (+1)




Készletléti állapotban az adott kézibeszélő belső híváskor használt száma látható a kijelzőn. A bázisegységet középre kell telepíteni, hogy valamennyi kézibeszélő esetében hasonló méretű legyen az ellátott terület.

Belső hívás

1. Nyomja meg a  gombot (jobb menügomb).
2. Adja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát (**1-5**).

Ha belső hívás közben külső hívás érkezik, erre egy hangjelzés figyelmeztet. A  gombbal megszakíthatja a belső hívást, és a  megnyomásával fogadhatja a külső hívást.

Hívásátadás/konferencia a kézibeszélők között

1. Várja meg a külső hívás kapcsolását.
2. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a **BELSO HIVAS** pontra. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Adja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát (**1-5**).
4. Átadás:  megnyomásával.
Konferencia:  nyomva tartásával.



Új kézibeszélő regisztrálása

A csomag valamennyi kézibeszélője regisztrálva van a bázisegységen.

Az eljárás csak új kézibeszélő vagy szervizelés esetén használatos.

Egy bázisegységen legfeljebb 5 kézibeszélő regisztrálható.

Ez a modell kompatibilis a GAP (Generic Access Profile) protokollal, így a kézibeszélő és a bázisegység egyaránt használható egyéb GAP-kompatibilis készülékekkel, függetlenül azok gyártójától. A GAP protokoll azonban önmagában nem szavatolja az összes funkció elérhetőségét. Tartozékként nem vásárolható további kézibeszélő.

1. Tartsa nyomva kb. 6 másodpercig a bázis  gombját.
2. Nyomja meg a  gombot. Lépjen a **REGISZTRACIO** pontra. Nyomja meg az **OK** gombot.
3. Írja be a bázis PIN kódját (pl. 0000). Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Sikeres regisztráció esetén a kézibeszélő egy percen belül újra készletléti állapotba lép.

Hibaelhárítás

Ellenőrizze, ép-e és megfelelően van-e csatlakoztatva a telefonzsínór. Csatolja le az egyéb berendezéseket, hosszabbítózsínórokat és további telefonokat. Ha ez megoldja a problémát, akkor azt a csatlakoztatott eszközök okozták.

Próbálja a készüléket egy biztosan működő vonalra kapcsolni (pl. a szomszédban). Ha a készülék itt működik, akkor feltehetőleg hibás az eredeti telefonvonal. Tájékoztassa a telefonszolgáltatót.

Csengéskor nem jelenik meg szám

- A funkció csak a hívóazonosítás szolgáltatás előfizetése esetén működik.

Figyelmeztetőhang hívás közben/nem kezdeményezhető hívás

- Lehet, hogy gyenge az akkumulátor (töltse fel a kézibeszélőt).
- A kézibeszélő majdnem hatókörön kívül van. Menjen közelebb a bázisegységhez.

A telefon nem működik

- Ellenőrizze a tápegység/telefonzsínór csatlakoztatását.
- Ellenőrizze, hangeffektusos tárcsázás van-e beállítva; lásd: *Rendszerbeállítások*.
- Ellenőrizze a kézibeszélő akkumulátorának töltöttségi szintjét.
- Csatlakoztasson egy másik, működő telefont a telefonhálózati aljzathoz.

A telefon a hívás fogadása után tovább csenget

- A telefon bizonyos csengőhangjai nem követik a vonaljelet, ezért a csengés a hívás fogadása után még 8 másodpercig folytatódhat.

Ha a telefon továbbra sem működik, forduljon a készüléket eladó szaküzlethez. Vigye magával a nyugtát vagy a számla másolatát.

Jótállás és információk

Megfelelőségi nyilatkozat

A Doro kijelenti, hogy a PHONE-DEX készülékek megfelelnek az 1999/5/EK (R&TTE) és a 2002/95/EK (ROHS) irányelv alapvető követelményeinek és egyéb rendelkezéseinek. A gyártó nyilatkozatának egy példánya megtalálható a www.doro.com/dofc címen.

Jótállás

A készülékhez a vásárlás napjától számított 24 hónapos jótállást nyújtunk. Ha bármilyen problémát tapasztal, forduljon a készüléket eladó szaküzlethez. A jótállási idő alatt mindenfajta javításhoz és támogatáshoz vásárlási bizonylat szükséges.

A jótállás nem vonatkozik az olyan hibákra, melyeket baleset vagy sérülés, folyadék, gondatlanság, nem rendeltetésszerű használat, a karbantartás elmulasztása vagy a felhasználó részéről történő bármilyen egyéb helytelen tevékenység okozott. A jótállás nem terjed ki továbbá a villám vagy bármilyen egyéb feszültségingadozás okozta hibákra. Vihar idején óvintézkedésként javasolt a készüléket lecsatolni a hálózatról.

Ez a jótállás nem terjed ki az akkumulátorokra és más fogyóeszközökre.

Az eredeti DORO akkumulátoroktól eltérő akkumulátorok használata esetén a jótállás érvényét veszti.

Specifikus elnyelési ráta (SAR)

Ez az eszköz megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó érvényes nemzetközi biztonsági követelményeknek. A telefon SAR-értéke 0,04 W/kg (10 g szövetben). A WHO által megállapított határérték 2 W/kg (10 g szövetben).

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
PHONE-DEX



Magyarul

V. 1.2

www.doro.com



Printed by HTO / 2011-07
514 0200 022 #01