

# WIDEX **MOMENT**™

## NOTICE D'UTILISATION LA SÉRIE **WIDEX MOMENT**™

Modèle MBR3D  
Contour  
(Contour d'oreille)



**WIDEX**®  
HIGH DEFINITION HEARING

# VOTRE AIDE AUDITIVE

(À compléter par votre audioprothésiste)

Ceci est une liste de programmes disponibles pour votre aide auditive.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de ces programmes, voir Personnalisation.

**Les programmes de votre aide auditive :**

<b>PROGRAMMES</b>	<b>TRANSPOSITION FRÉQUENTIELLE</b>
<input type="checkbox"/> Universel	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PureSound	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Silence	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Confort	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Transport	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ville	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Impact	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fête	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Social	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Musique	<input type="checkbox"/>

## PROGRAMMES SPÉCIAUX

Zen

Téléphone

## TRANSPPOSITION FRÉQUEN- TIELLE

## PROGRAMMES SMARTTOGGLE

Zen+

## TRANSPPOSITION FRÉQUEN- TIELLE

Les noms des programmes dans le tableau sont les noms par défaut. Si vous souhaitez utiliser d'autres noms, notez les nouveaux noms dans le tableau. Ainsi, vous saurez toujours quels sont les programmes disponibles dans vos aides auditives.

### Lisez ces instructions

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation de ce livret « Systèmes de maintien auriculaire pour les aides auditives Widex » avant de vous servir de votre aide auditive. Merci de lire également la notice d'utilisation du chargeur.

### Streaming audio et contrôle sans fil

Cette aide auditive permet le streaming audio et le contrôle direct sans fil depuis les smartphones et autres appareils via les DEX. Pour obtenir plus d'aide et d'informations, veuillez contacter votre audioprothésiste ou consulter le site : <https://global.widex.com>.

L'aide auditive fonctionne sans fil avec l'application MOMENT. Nous déclinons toute responsabilité si l'aide auditive est utilisée avec une application tierce ou si l'application est utilisée avec un autre appareil. Pour en savoir plus sur l'application, veuillez lire le livret.

# SOMMAIRE

<b>INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....</b>	<b>7</b>
<b>VOTRE AIDE AUDITIVE.....</b>	<b>10</b>
Bienvenue.....	10
Votre aide auditive en un clin d'œil.....	11
<b>CONDITIONS D'UTILISATION.....</b>	<b>13</b>
Indications d'utilisation.....	13
Les aides auditives avec piles rechargeables.....	13
Usage auquel cet appareil est destiné.....	13
Chargement.....	14
Temps d'utilisation et temps de chargement.....	14
Conditions de fonctionnement et de charge.....	16
Conditions de stockage et de transport.....	17
<b>UTILISATION QUOTIDIENNE.....</b>	<b>19</b>
Allumer et éteindre l'aide auditive.....	19
Mettre et enlever l'aide auditive.....	20
<b>PERSONNALISATION.....</b>	<b>21</b>
Programmes.....	21
Le programme Zen.....	23
Les signaux sonores et lumineux.....	23
Partenaire perdu .....	28

Réglage du son et des programmes.....	29
L'utilisation d'un smartphone avec votre aide auditive.....	30
<b>APPAIRAGE AVEC VOTRE SMARTPHONE.....</b>	<b>31</b>
Connexion avec votre smartphone via Bluetooth .....	31
Comment connecter l'aide auditive à l'application ?.....	31
Comment désactiver la connexion Bluetooth ?.....	31
<b>NETTOYAGE.....</b>	<b>32</b>
Outils.....	32
Boîte asséchante.....	33
<b>ACCESSOIRES.....</b>	<b>34</b>
<b>DÉPANNAGE.....</b>	<b>36</b>
<b>VOYAGE EN AVION.....</b>	<b>39</b>
<b>INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES.....</b>	<b>40</b>
Déclarations FCC et ISED.....	40
Directives UE.....	42
Directive 2014/53/UE.....	42
Informations de destruction.....	43
<b>SYMBOLES.....</b>	<b>44</b>

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ces pages avant d'utiliser votre aide auditive.



**Les aides auditives et les piles peuvent être dangereuses si elles sont avalées ou utilisées à mauvais escient. Une ingestion ou une utilisation inadéquate peut entraîner de graves lésions ou même être mortelle. En cas d'ingestion, appelez le numéro d'urgence local ou contactez immédiatement votre hôpital.**



Enlevez vos aides auditives lorsque vous ne les utilisez pas. Cela permettra de ventiler votre conduit auditif et de prévenir les infections de l'oreille.



Contactez immédiatement votre médecin ou votre ORL si vous pensez que votre oreille est infectée ou que vous faites une réaction allergique.



Contactez votre audioprothésiste si l'aide auditive n'est pas agréable à porter ou si elle ne s'adapte pas correctement à votre oreille, provoquant une irritation, des rougeurs ou autres désagréments semblables.



Enlevez vos aides auditives avant de prendre une douche, de nager ou d'utiliser un sèche-cheveux.



Ne portez pas vos aides auditives lorsque vous appliquez du parfum, du spray, du gel, une lotion ou de la crème.



Ne séchez pas votre aide auditive dans un four à micro-ondes car cela l'abîmerait.



N'utilisez jamais les aides auditives d'autres personnes et ne permettez pas à autrui d'utiliser les vôtres. Cela pourrait endommager votre audition.



N'utilisez jamais vos aides auditives dans des environnements contenant des gaz explosifs, comme dans des mines.



**Tenez vos aides auditives, leurs composants, les accessoires et les piles hors de portée des enfants et des personnes handicapées mentales.**



N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer vous-même votre aide auditive. Adressez-vous à votre audioprothésiste si vous avez besoin de faire réparer votre aide auditive.



Vos aides auditives contiennent des technologies de communication radio. Respectez toujours l'environnement dans lequel vous les utilisez. Si des restrictions s'appliquent, vous devez prendre des précautions pour les respecter.



Votre appareil a été fabriqué en conformité avec les normes internationales de compatibilité électromagnétique. Cependant, il est encore possible qu'il cause des interférences avec d'autres équipements électriques. Si vous subissez des interférences, éloignez-vous des autres équipements électriques.



**Veuillez noter que le streaming sonore à une intensité élevée dans vos aides auditives peut vous empêcher d'entendre d'autres sons importants comme les alarmes et le bruit de la circulation. Dans de telles situations, assurez-vous de maintenir le volume du streaming sonore à un niveau approprié.**



Votre aide auditive est très puissante et elle peut émettre des sons d'un niveau sonore supérieur à 132 dB. Vous risquez donc d'endommager votre audition résiduelle.





N'exposez pas vos aides auditives à des températures extrêmes ou à une forte humidité et séchez-les rapidement si elles se mouillent ou si vous transpirez abondamment.



N'utilisez pas de liquide ou de désinfectant pour nettoyer votre aide auditive.



Nettoyez et contrôlez votre aide auditive chaque jour après utilisation afin de vérifier qu'elle n'est pas brisée. Si l'aide auditive se brise alors que vous la portez et que des petits fragments restent dans votre conduit auditif, consultez un médecin. N'essayez jamais de retirer vous-même ces fragments.

# VOTRE AIDE AUDITIVE

## **Bienvenue**

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle aide auditive.

Cette aide auditive est alimentée par une pile lithium-ion rechargeable et doit être utilisée avec le modèle de chargeur WPT202. La pile est intégrée et vous ne pouvez pas la remplacer.


Nous recommandons d'utiliser régulièrement votre aide auditive, même si cela demande un certain temps pour s'y habituer. Les utilisateurs ponctuels ne profitent généralement pas pleinement des avantages d'une aide auditive.

### **REMARQUE**


Votre aide auditive et ses accessoires ne sont peut-être pas exactement identiques à ceux représentés dans ce mode d'emploi. En outre, nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications que nous jugerons nécessaires.

## Votre aide auditive en un clin d'œil

L'illustration représente votre aide auditive sans le système de maintien auriculaire. Pour plus d'informations sur le système de maintien auriculaire, voir le manuel sur le système de maintien auriculaire. Le système de maintien auriculaire est composé d'un tube et d'un dôme ou embout. Il s'agit de la partie de l'aide auditive que vous portez à l'intérieur de l'oreille.

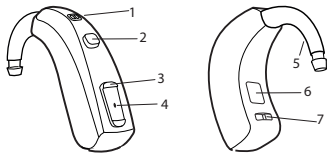

1. Entrée du microphone
2. Bouton de sélection des programmes / Interrupteur marche/arrêt
3. Contrôle du volume
4. Voyant lumineux
5. Coude
6. Plaque d'identification (modèle et numéro de série)
7. Identification gauche/droite. La couleur bleue indique votre aide auditive gauche, tandis que la couleur rouge indique votre aide auditive droite.

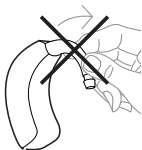

Veillez noter que le coude est fixé à l'aide auditive et ne doit pas être enlevé.

# CONDITIONS D'UTILISATION

## Indications d'utilisation

Les aides auditives sont indiquées pour les personnes de plus de 36 mois présentant une perte auditive minimale (10 dB HL) à sévère/profonde (105 dB HL) et pour toutes les configurations de déficiences auditives.

Elles doivent être programmées par des audioprothésistes agréés (experts en audiologie, spécialistes en aides auditives, ORL) qualifiés en adaptation auditive.

## Les aides auditives avec piles rechargeables


**Les aides auditives avec piles rechargeables ne doivent PAS être utilisées par des enfants de moins de 36 mois ou par des personnes handicapées mentales.**

## Usage auquel cet appareil est destiné

Les aides auditives sont des appareils amplificateur à conduction aérienne prévus pour être utilisés en environnements d'écoute quotidiens. Les aides auditives peuvent être dotées du programme Zen, destiné à fournir un fond sonore relaxant (c'est-à-dire une source musicale/de bruit) pour les adultes qui désirent écouter un tel fond dans le calme.

## Chargement

Nous vous recommandons de recharger quotidiennement votre aide auditive. Cette illustration représente votre chargeur en un coup d'œil :

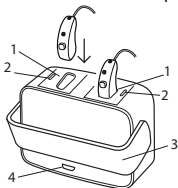


1. Socles de recharge
2. Voyants lumineux
3. Couvercle à charnière
4. Micro port USB

Pour plus d'informations sur la charge de votre aide auditive, veuillez consulter la notice d'utilisation du chargeur.

## Temps d'utilisation et temps de chargement

Le chargement complet de votre aide auditive prendra environ 4 heures. Si vous rechargez votre aide auditive pendant une demi-heure, vous pourrez l'utiliser pendant environ 4 heures.

Lorsque l'aide auditive est complètement chargée, vous pouvez l'utiliser pendant au moins 24 heures dans des environnements sonores normaux avant la prochaine recharge.

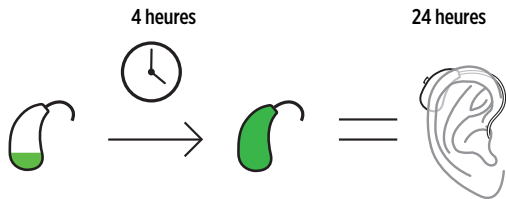

Lorsque vous entendez l'alarme indiquant le niveau faible de la pile, il vous restera environ 3 à 4 heures d'utilisation normale. L'aide auditive s'éteint lorsque le niveau de la pile est extrêmement faible.

La déficience auditive, l'environnement sonore et le streaming sont des facteurs qui ont une influence sur le temps d'utilisation estimé. Si, par exemple, vous utilisez le service de streaming, vous réduirez le temps d'utilisation de l'aide auditive.

## Conditions de fonctionnement et de charge

Votre aide auditive a été conçue pour fonctionner dans les situations de tous les jours et elle fonctionne dans des conditions environnementales qui sont agréables pour vous. Vous pouvez porter votre aide auditive à bord d'un avion, mais vous devez la retirer avant de prendre une douche, de vous baigner ou de dormir.

### Conditions de fonctionnement

	Minimum	Maximum
Température	0° C (32° F)	40° C (104° F)
Humidité	10 % HR	95 % HR
Pression atmosphérique	750 mbar	1060 mbar

### Conditions de chargement

	Minimum	Maximum
Température	0° C (32° F)	30° C (86° F)
Humidité	10 % HR	95 % HR



## Stockage à long terme lorsque vous ne l'utilisez pas

Si vous prévoyez de ne pas porter votre aide auditive pendant une longue période, chargez-la complètement et rangez-la dans l'étui dans lequel vous l'avez reçue. N'oubliez pas d'éteindre l'aide auditive avant de la ranger.

Vous devrez recharger l'aide auditive tous les 6 mois pour éviter une décharge complète et irrécupérable de la pile. Une pile complètement déchargée ne peut plus être chargée et doit être remplacée. Cependant, nous vous recommandons de la recharger plus fréquemment que tous les 6 mois.

## Conditions de stockage et de transport

Votre aide auditive est sensible aux conditions extrêmes telles que les températures élevées. Elle ne doit pas être stockée ou transportée en plein soleil, mais uniquement dans les conditions suivantes.

### Conditions de stockage

	Minimum	Maximum
Température	10°C (50°F)	40°C (104°F)*
Humidité	20 % HR	80 % HR

\*La température recommandée est comprise entre 10 et 25 °C.

### Conditions de transport

	Minimum	Maximum
Température	-20°C (-4°F)	55°C (131°F)

	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
<b>Humidité</b>	10 % HR	95 % HR

Vous trouverez les fiches techniques et davantage d'informations sur vos aides auditives sur <https://global.widex.com>.

# UTILISATION QUOTIDIENNE

## Allumer et éteindre l'aide auditive

### **Vous pouvez allumer l'aide auditive de deux manières :**

1. Appuyez sur le bouton poussoir et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Après encore quelques secondes, le voyant lumineux sur le contrôle du volume clignotera d'une lumière verte et l'aide auditive émettra un signal sonore pour indiquer qu'elle est allumée, à moins que vous ayez convenu avec votre audioprothésiste de désactiver cette fonction.
2. Retirez l'aide auditive du chargeur. Elle s'allumera automatiquement après quelques secondes. Le voyant sur le contrôle du volume clignotera d'une lumière verte et l'aide auditive émettra un signal sonore pour indiquer que l'aide auditive est allumée.

### **Vous pouvez éteindre l'aide auditive de deux manières :**

1. Placez l'aide auditive dans le chargeur et le chargement commencera.
2. Appuyez sur le bouton poussoir et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Vous entendrez un son final et le voyant sur le contrôle du volume clignotera d'une lumière rouge.

## Mettre et enlever l'aide auditive

### Mettre l'aide auditive




1. Insérez le système de maintien auriculaire dans l'oreille tout en tenant la partie basse du tube/fil écouteur. Pour ce faire, il est conseillé de tirer dans le même temps l'oreille externe vers le haut et vers l'arrière.

2. Puis placez l'aide auditive derrière l'oreille. L'aide auditive doit reposer confortablement sur l'oreille, près de votre tête.

Votre aide auditive peut être programmée avec différents types de systèmes de maintien auriculaire. Pour plus d'informations sur votre système de maintien auriculaire, voir le manuel sur le système de maintien auriculaire séparé.

### Retrait de l'aide auditive

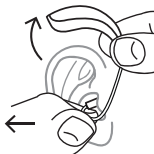

Commencez par retirer l'aide auditive de derrière l'oreille.

Puis sortez précautionneusement le système de maintien auriculaire du conduit auditif tout en tenant la partie inférieure du tube/fil écouteur.

# PERSONNALISATION

## Programmes

Ceci est un aperçu des programmes que vous pouvez sélectionner. Consultez votre audioprothésiste pour plus de détails.

<b>PROGRAMMES</b>	<b>UTILISATION</b>
Universel	Programme automatique privilégiant un son optimal dans toutes les situations
PureSound	Programme automatique privilégiant un son naturel et agréable dans toutes les situations
Silence	Programme spécial pour environnements calmes
Confort	Programme spécial pour environnements bruyants
Transport	Pour une écoute en présence de bruit provenant de voitures, trains, etc.
Impact	Utilisez ce programme si vous préférez un son clair et aigu
Ville	Pour une écoute en présence de niveaux sonores changeants (dans les supermarchés, les lieux de travail bruyants ou semblables)

<b>PROGRAMMES</b>	<b>UTILISATION</b>
Fête	Pour une écoute en présence d'un grand nombre de personnes qui parlent en même temps
Social	Utilisez ce programme lors de réunions en petits comités, comme les repas de famille par exemple
Musique	Pour écouter de la musique
<b>PROGRAMMES SPÉCIAUX</b>	<b>UTILISATION</b>
Zen	Émet des tonalités ou du bruit pour un fond sonore relaxant. Pour plus d'informations, voir « Le programme Zen »
Téléphone	Ce programme est conçu pour écouter les conversations téléphoniques
<b>SMARTTOGGLE PROGRAMMES</b>	<b>UTILISATION</b>
Zen+	Ce programme est semblable à Zen mais vous permet d'écouter différents types de tonalités ou un bruit à l'aide d'une radiocommande (RC-DEX ou application)

Les noms apparaissant dans la liste des programmes sont les noms par défaut. Votre audioprothésiste peut également choisir un autre nom de programme dans la liste proposée. Il est alors encore plus facile pour vous de sélectionner le bon programme suivant la situation d'écoute.

Selon votre déficience auditive, votre audioprothésiste peut activer la fonctionnalité Transposition fréquentielle. Demandez à votre audioprothésiste s'il pense que cette fonctionnalité peut vous être utile.

Si vos besoins et préférences évoluent au fil du temps, votre audioprothésiste pourra facilement modifier votre sélection de programmes.

## **Le programme Zen**

Votre aide auditive peut être dotée d'un programme d'écoute unique appelé Zen. Il émet des sons musicaux (et parfois un bruit de ruée) en arrière-plan.



Si vous percevez une baisse d'intensité ou de tolérance aux sons, une parole peu claire ou une aggravation de vos acouphènes, veuillez contacter votre audioprothésiste.



L'utilisation du programme Zen peut interférer avec l'audition des sons de la vie de tous les jours, notamment la parole. Il ne doit pas être utilisé lorsqu'il est essentiel de pouvoir entendre de tels sons. Dans ces situations, réglez l'aide auditive sur un programme autre que Zen.

## **Les signaux sonores et lumineux**





Demandez à votre audioprothésiste de désactiver les signaux sonores ou lumineux si vous n'en avez pas besoin.

## Signaux sonores des programmes

Votre aide auditive émet des sons pour vous indiquer quel programme vous avez activé ou que vous avez changé de programme. Ces sons peuvent être des messages vocaux (SmartSpeak) ou des bips sonores (SmartTones) selon la programmation de votre aide auditive par votre audioprothésiste.

Programme 1	Message ou un bip bref
Programme 2	Message ou deux bips brefs
Programme 3	Message ou trois bips brefs
Programme 4	Message ou un bip long et un bip bref
Programme 5	Message ou un bip long et deux bips brefs

## Vue d'ensemble des voyants

Voyants lumineux	État
Clignotement vert lent 	L'aide auditive s'allume
Clignotement vert 	L'aide auditive est allumée Niveau de la pile supérieur à 20 %
Clignotement rouge 	L'aide auditive est allumée Pile faible, niveau inférieur à 20 %
Clignotement rouge rapide 	L'aide auditive s'éteint



## Voyants lumineux

## État

Clignotement vert



L'aide auditive a été appairée avec succès avec un appareil Bluetooth

**Indication spéciale de soin. Cette fonctionnalité peut être activée par votre audioprothésiste**

## État

Clignotement vert continu



L'aide auditive est allumée  
Niveau de la pile supérieur à 20 %

Clignotement rouge continu



L'aide auditive est allumée  
Pile faible, niveau inférieur à 20 %

## Bouton poussoir pour signaux sonores et lumineux

Notez que cette fonction peut être désactivée par votre audioprothésiste.

<b>Action du bouton poussoir et du contrôle du volume</b>	<b>Type d'indication sonore</b>	<b>Explication de l'indication sonore</b>
Réglage du volume.	Bip sonore.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Vous entendrez un double bip sonore lorsque vous atteindrez le niveau sonore par défaut.</li><li>- Vous entendrez un son continu lorsque vous atteindrez le réglage maximum ou minimum.</li><li>- Vous entendrez un bip sonore chaque fois que vous réglerez le volume.</li></ul>
Passer d'un programme à un autre.	Message vocal ou bip sonore.	Lorsque vous passerez à un autre programme, l'aide auditive retournera au paramètre du volume par défaut.

<b>Action du bouton poussoir et du contrôle du volume</b>	<b>Type d'indication sonore</b>	<b>Explication de l'indication sonore</b>
Mise en marche.	Message vocal ou bip sonore et voyant lumineux.	Le voyant sur le contrôle du volume clignotera d'une lumière verte pour indiquer que l'aide auditive est en train de s'allumer.
Arrêt.	Message vocal ou bip sonore et voyant lumineux.	Le voyant sur le contrôle du volume clignotera d'une lumière rouge pour indiquer que l'aide auditive est en train de s'éteindre.

<b>Action du bouton poussoir et du contrôle du volume</b>	<b>Type d'indication sonore</b>	<b>Explication de l'indication sonore</b>
Vérification de l'état de l'alimentation en baissant le volume.	Indication lumineuse	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le voyant lumineux clignotera d'une lumière verte si l'aide auditive est allumée et que le niveau de la pile est supérieur à 20 %</li> <li>- Le voyant lumineux clignotera d'une lumière rouge si l'aide auditive est allumée et que le niveau de la pile est inférieur à 20 %</li> <li>- Un niveau de pile à 20 % correspond à environ 4 heures d'utilisation.</li> </ul>

## **Partenaire perdu**

Votre audioprothésiste peut activer la fonctionnalité de votre aide auditive qui vous avertit lorsqu'elle perd tout contact avec l'aide auditive placée sur l'autre oreille. Vous entendrez un message vocal.

## Réglage du son et des programmes

### Application **MOMENT**

Vous pouvez connecter votre smartphone à votre aide auditive **MOMENT** avec l'application **MOMENT** pour le streaming et pour contrôler les fonctions de l'aide auditive. Vous pouvez, par exemple, personnaliser votre expérience d'écoute, changer de programme et régler ou couper le son de votre aide auditive.

### **Radiocommande**

Si vous possédez une radiocommande, vous pouvez également changer de programme ou régler manuellement l'intensité sonore pour obtenir plus de confort ou plus d'audibilité selon vos besoins et vos préférences. Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez vous adresser à votre audioprothésiste.

Votre aide auditive s'ajuste automatiquement au son en fonction de votre environnement sonore.

Vous pouvez également régler manuellement le son pour obtenir plus de confort ou plus d'audibilité selon vos besoins et vos préférences. Pour plus d'informations sur ce sujet, veuillez vous adresser à votre audioprothésiste.

Suivant les réglages et les fonctionnalités de l'aide auditive, tout ajustement du son aura une incidence sur les deux aides auditives.

Chaque fois que vous actionnez le contrôle du volume, vous entendrez un bip sonore à moins que votre audioprothésiste n'ait désactivé cette fonction. Lorsque vous atteindrez le réglage maximum ou minimum, vous entendrez un son continu.

### **Pour désactiver le son de votre aide auditive procédez comme suit :**

- Maintenez la partie inférieure du contrôle du volume enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un son constant.

### **Pour activer de nouveau le son :**

- Appuyez sur la partie supérieure du contrôle du volume **ou**
- Changez de programme

Tout réglage du volume sera annulé lorsque vous éteindrez votre aide auditive ou lorsque vous changerez de programme.

### **L'utilisation d'un smartphone avec votre aide auditive**



Lorsque vous utilisez un smartphone, tenez-le devant vous de manière à ce que le microphone du téléphone soit près de votre bouche. De cette façon, vous bénéficierez du meilleur son possible pendant votre appel téléphonique.

## **APPAIRAGE AVEC VOTRE SMARTPHONE**

### **Connexion avec votre smartphone via Bluetooth**

Pour appairer votre aide auditive avec votre smartphone, vous devez redémarrer votre aide auditive. Faites comme suit :

1. Redémarrez votre aide auditive.
2. Placez l'aide auditive près de votre téléphone et suivez les instructions de l'application MOMENT. Le voyant clignotera d'une lumière verte pour indiquer que l'appairage est réussi.
3. L'aide auditive et le smartphone sont désormais prêts à être utilisés.

#### **REMARQUE**

Votre aide auditive est uniquement en mode d'appairage pendant les trois minutes qui suivent son redémarrage. Vous pourriez devoir la redémarrer si vous ne l'apparez pas à temps.

### **Comment connecter l'aide auditive à l'application ?**

Lorsque vous avez appairé votre aide auditive avec votre smartphone (dans le menu des paramètres), ouvrez l'application MOMENT. Elle se connectera automatiquement à l'aide auditive.

### **Comment désactiver la connexion Bluetooth ?**

Allez dans le menu Plus de l'application MOMENT et sélectionnez « Bluetooth pour aide auditive » pour désactiver la connexion Bluetooth. Le Bluetooth se reconnectera lorsque l'aide auditive aura été redémarrée.

## NETTOYAGE

Un nettoyage quotidien de votre aide auditive la rendra plus efficace et plus agréable à porter.



Essayez l'aide auditive avec un chiffon doux et sec.

Si les entrées du microphone sont obstruées, veuillez vous adresser à votre audioprothésiste.


Si vous remarquez de la poussière ou des saletés sur les microphones, éliminez-les en soufflant doucement dessus ou essuyez-les avec un chiffon doux.

Séchez rapidement votre aide auditive si elle a pris l'humidité ou si vous avez beaucoup transpiré.

Pour plus d'informations sur la manière de nettoyer le système de maintien auriculaire, voir le manuel dédié.

## Outils

Avec votre aide auditive, vous recevrez les outils suivants :

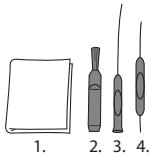

1. Chiffon
2. Brosse pour système de maintien auriculaire
3. Long outil de retrait du cérumen pour système de maintien auriculaire
4. Court outil de retrait du cérumen pour système de maintien auriculaire



## **Boîte asséchante**

La boîte asséchante de WIDEX pour sécher votre aide auditive et le système de maintien auriculaire élimine l'humidité de l'aide auditive et du système de maintien auriculaire pour éviter les dysfonctionnements dus à l'humidité.

Temps de fonctionnement : 45 minutes

Température maximale : 40° C (104° F)

## ACCESSOIRES

Vous pouvez utiliser plusieurs accessoires avec votre aide auditive. Demandez à votre audioprothésiste si ces accessoires peuvent vous être utiles.

<b>Nom</b>	<b>Utiliser</b>
RC-DEX	radiocommande
TV-DEX	pour l'écoute de la télévision et d'une source audio
PHONE-DEX 2*	pour une utilisation simple du téléphone fixe
FM+DEX	pour le streaming audio et les signaux FM
COM-DEX	pour une connexion sans fil vers les téléphones mobiles et autres appareils via Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	pour aider les utilisateurs d'aide auditive à entendre la parole en situations d'écoute difficiles
TV PLAY	pour une diffusion directe du son de la télévision
Chargeur WPT202	pour l'aide auditive MBR3D
Chargeur WPC201	CHARGE n CLEAN pour l'aide auditive MBR3D

<b>Nom</b>	<b>Utiliser</b>
APPLICATION MOMENT	pour utiliser votre smartphone afin de contrôler vos aides auditives

\*Uniquement disponible dans certains pays.

## DÉPANNAGE

Ces pages vous informent sur ce que vous pouvez faire si votre aide auditive cesse de fonctionner ou si elle ne fonctionne pas comme prévu. Si le problème persiste, veuillez contacter votre audioprothésiste.

<b>Problème</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Solution</b>
L'aide auditive est totalement silencieuse	Elle n'est pas allumée.	Allumez l'aide auditive en appuyant sur le bouton-poussoir ou en la plaçant dans le chargeur pendant 10 secondes avant de la retirer
	L'aide auditive n'est pas entièrement chargée	Chargez l'aide auditive dans le chargeur
L'aide auditive est complètement silencieuse bien qu'elle soit chargée et allumée	Le pare-cérumen est obstrué par du cérumen.	Retirez le dôme du fil écouteur/tube. Si du cérumen s'est accumulé dans le pare-cérumen, remplacez le pare-cérumen. Pour plus d'informations, voir le manuel sur le système de maintien auriculaire. Vous pouvez également contacter votre audioprothésiste pour conseils.

<b>Problème</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Solution</b>
Le volume de l'aide auditive n'est pas assez puissant	Votre oreille est obstruée par du cérumen	Contactez votre médecin
	Le pare-cérumen est obstrué par du cérumen.	Retirez le dôme du fil écouteur/ tube. Si du cérumen s'est accumulé dans le pare-cérumen, remplacez le pare-cérumen. Pour plus d'informations, voir le manuel sur le système de maintien auriculaire. Vous pouvez également contacter votre audioprothésiste pour conseils.
	Il se peut que votre audition ait changé	Veillez consulter votre audioprothésiste/ médecin
L'aide auditive siffle en continu	Votre oreille est obstruée par du cérumen	Contactez votre médecin
	Le système de maintien auriculaire n'est pas correctement placé	Voir « Mettre et enlever l'aide auditive »

<b>Problème</b>	<b>Cause possible</b>	<b>Solution</b>
Vos deux aides auditives ne fonctionnent pas de manière synchronisée	Il n'y a plus de connexion entre les aides auditives	Éteignez-les puis rallumez-les
Les deux aides auditives ne répondent pas au changement de volume ou de programme demandé par l'accessoire	L'accessoire est utilisé au-delà de la portée de transmission	Rapprochez l'accessoire des aides auditives
	Forte interférence électromagnétique	Éloignez-vous de la source d'interférence électromagnétique connue
	L'accessoire et les aides auditives ne sont pas appairés	Vérifiez auprès de votre audioprothésiste que l'accessoire est bien appairé avec les aides auditives

#### **REMARQUE**

Ces informations ne concernent que l'aide auditive. Voir la notice d'utilisation « Systèmes de maintien auriculaire pour les aides auditives Widex » pour plus d'informations spécifiques sur votre système de maintien auriculaire. Si les problèmes persistent, veuillez contacter votre audioprothésiste.

## VOYAGE EN AVION

L'aide auditive et le chargeur sont autorisés dans les bagages à main et dans les bagages en soute.

Vous devez désactiver la connexion Bluetooth de l'aide auditive à l'aide de l'application. Il n'y a aucun risque de transmission depuis l'émetteur radio de 2,4 GHz de l'aide auditive tant que l'aide auditive n'est pas connectée au téléphone portable.

# INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

## Déclarations FCC et ISED

FCC ID: 2AXDT-MBR3D

IC: 26428-MBR3D

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or tele-



vision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**NOTE:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by WSAUD A/S could void the user's authority to operate the equipment.

**ISED Statement / Déclaration d'ISED**

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

#### ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

## **Directives UE**

### **Directive 2014/53/UE**

Par la présente, WSAUD A/S déclare que cet appareil MBR3D est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.

L'aide auditive MBR3D comprend des émetteurs de radio fonctionnant à : 10,6MHz, -30 dB $\mu$ A/m @10m; 2,4 GHz, Max 1,0mW.

Une copie de la Déclaration de conformité à la Directive 2014/53/UE peut être consultée sur :

**<https://global.widex.com/doc>**

Pour éviter toute dégradation potentielle des performances radio, votre appareil doit être éloigné d'au moins 25 cm de tout autre matériel de communication radio.



N26346

### **Informations de destruction**

Ne mettez pas les aides auditives, accessoires d'aides auditives et chargeur au rebut avec les ordures ménagères.

Les aides auditives, accessoires d'aides auditives et chargeur doivent être mis au rebut dans des endroits prévus pour des déchets d'équipements électriques et électroniques ou bien remis à votre audioprothésiste pour une mise au rebut en toute sécurité.

# SYMBOLES

Symboles communément utilisés par WSAUD A/S pour l'étiquetage des dispositifs médicaux (étiquettes/Mode d'emploi/etc.)

## Symbole Titre/Description

---



### Fabricant

Le produit est fabriqué par le fabricant dont le nom et l'adresse sont indiqués à côté du symbole. Si besoin, la date de fabrication peut également être indiquée.

---



### Référence du produit

Référence du produit (article).

---



### Veillez consulter le mode d'emploi

Le mode d'emploi comprend des informations importantes (avertissements/précautions). Il est impératif de le lire attentivement avant d'utiliser le produit.

---



### Avertissement

Lisez attentivement le texte marqué d'un symbole d'avertissement avant d'utiliser le produit.

---



### Marque DEEE

« Ne pas jeter avec les déchets ordinaires ». Lorsque vous devez jeter un produit, il doit être rapporté à un point de collecte agréé pour ce recyclage et cette destruction afin d'éviter les risques de pollution environnementale ou de nuisance à la santé humaine par la présence de substances dangereuses.

---

**Symbole Titre/Description**

---



**Marquage CE**

Le produit est conforme aux exigences fixées par les directives européennes de marquage CE.

---



**Marque RCM**

Le produit est conforme aux normes de sécurité électrique, à la CEM et aux exigences réglementaires en matière de spectre des radiofréquences pour les produits vendus sur les marchés australien ou néo-zélandais.

---



**Marche/arrêt**

Pour indiquer la connexion à ou la déconnexion de la source d'alimentation.

---




**Dispositif médical**

Indication que l'aide auditive est un dispositif médical.

---





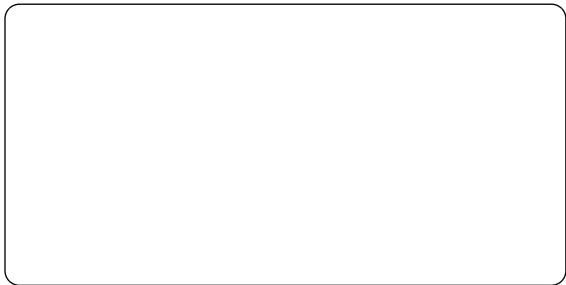

**WSAUD A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Danemark

<https://global.widex.com>



**0123**

**Mode d'emploi n° :**

9 514 0603 003 01

**Date de parution:**

2021-08



9 514 0603 003 01

