

Vedligeholdelse og rengøring af i-øret-høreapparater

6



En kort beskrivelse af hvordan man skal vedligeholde og rengøre CIC- og ITE-apparater




Denne brochure er nummer 6 i en serie fra Widex om hørelse og dertil knyttede emner.

WIDEX
high definition hearing

Vedligeholdelse

Et høreapparat er en værdigenstand, som bør behandles med forsigtighed og omtanke. Takket være den digitale teknologi fremstilles der i dag meget små og avancerede høreapparater – men for at få det fulde udbytte af apparatet er det vigtigt, at man rengør og vedligeholder det rigtigt. Dette er ikke kun vigtigt for apparatets funktion, men vil også give høreapparatet længere levetid.



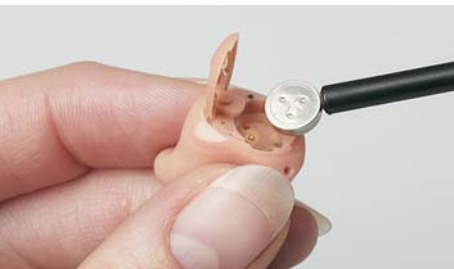

Man skal først og fremmest behandle høreapparatet med forsigtighed, og ikke udsætte det for belastninger, slag eller tryk. Når det sættes i og tages ud af øret, er det derfor en god ide at gøre det ind over et bord, da apparatet kan gå i stykker, hvis man taber det på gulvet.

Når apparatet ikke sidder i øret, skal det være slukket, batteriet skal tages ud og apparatet skal opbevares i den æske eller det etui, som følger med ved levering. Det er også vigtigt at opbevare apparatet, så det er utilgængeligt for børn og husdyr.



Høreapparater må ikke udsættes for varme eller fugt. Derfor er der flere situationer, hvor man ikke må benytte sit høreapparat – såsom når man går i bad, er under strålebehandling eller bruger hårtørrer, hårspray eller anden spray.

Rengøring

For alle typer høreapparater gælder det, at de aldrig må rengøres med vand eller nogen anden form for væske. Apparatets flader aftørres derimod med en blød klud, mens både lydudgang, mikrofonåbning og ventilationskanal renses med det medfølgende renseværktøj.

Ørevoks er høreapparatets "fjende" nummer ét. Blot den mindste smule voks kan bevirke, at apparatet slet ikke fungerer. Et høreapparat, der er placeret i øregangen, vil naturligvis komme i berøring med ørevoks, og derfor er det meget vigtigt at rengøre det ofte og på den rigtige måde.

Da voks og snavs kan sætte sig flere steder på apparatet, er det en god ide at kontrollere sit apparat, hver gang man tager det ud af øret. Ligesom tandbørstning er en daglig rutine, bør rengøring af høreapparatet også blive det.

Lydudgangen

En ophobning af voks kan nemt gøre, at apparatet ikke fungerer rigtigt. Hvis der har samlet sig voks rundt om lydudgangen, kan man bruge lidt køkkenrulle eller den lille klud til at fjerne det med. Det er bedst at vente til næste morgen, da voksen så vil være tør og nem at fjerne.






Ventilationskanalen

Rengøringen af ventilationskanalen (den gule åbning) er forskellig, alt efter om det drejer sig om et i-øret-apparat eller et CIC høreapparat, ligesom rensenålene også er forskellige.



CIC-apparatets rensenål har en kort og en lang "nål". Den længste har en lille kugle for enden og bruges til at rense ventilationskanalen fra den modsatte side af batterilåget, som vist på billedet. Hvis der er meget voks i ventilationskanalen anbefaler vi, at man først åbner batterilåget og tager batteriet ud. Så vender man høreapparatet så det åbne batterilåg vender nedad. Derved kan voksen komme denne vej ud af selve apparatet.

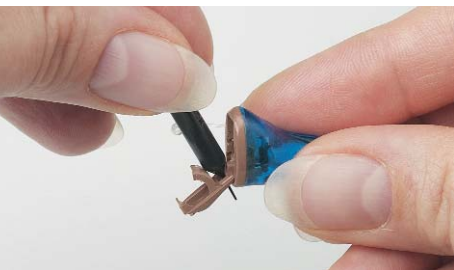

På i-øret-apparatet er ventilationskanalen altid gennemgående, og man kan derfor holde denne ren ved at stikke rensenålen hele vejen igennem. Her anvendes den meget lange rensenål.

Mikrofonåbningen

På CIC-apparater bruges den korte ende af rensenålen til at fjerne det voks, der har samlet sig omkring mikrofonåbningen i batterilåget. Låget skal igen åbnes, og derefter føres rensenålen gennem hullet indefra. Dette gøres om aftenen, når man er færdig med at bruge høreapparatet.

Hvis i-øret-apparatet er en model med gitter for mikrofonåbningen, skal den renses med den lille børste (se foto). Men er det en model uden gitter for mikrofonåbningen, skal denne renses med rensenålen (se foto).

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
Voksfang

Et voksfang er en slags filter, der er placeret i lydudgangens åbning. Dette filter er med til at forhindre, at voks og snavs når ind i selve apparatet. Hvis høreapparatet er forsynet med voksfang, er det vigtigt at fjerne voks og snavs omkring det. Brug den bløde klud eller den lille børste til dette formål.

Da produktionen af ørevoks er meget forskellig fra menneske til menneske, vil nogle høreapparatbrugere være nødt til at skifte voksfang ganske ofte, men andre kan nøjes med at gøre det for eksempel en gang hver 14.dag. Men uanset om apparatet har voksfang eller ej, skal man være opmærksom på aldrig at stikke noget direkte ind i lydudgangen.

Selvom man er omhyggelig med rengøring, kan det ske, at voks og snavs alligevel sætter sig i selve apparatet og forårsager, at det ikke virker. I så tilfælde må høreapparatet til eftersyn/repairation på høreklinikken eller hos forhandleren.





Printed by FB / 01-02
P 00M 0715 110